



Ora-Aid

オーラ エイド

- ▶ 手術後や抜歯後の傷口の保護に
- ▶ 縫合した後の保護に

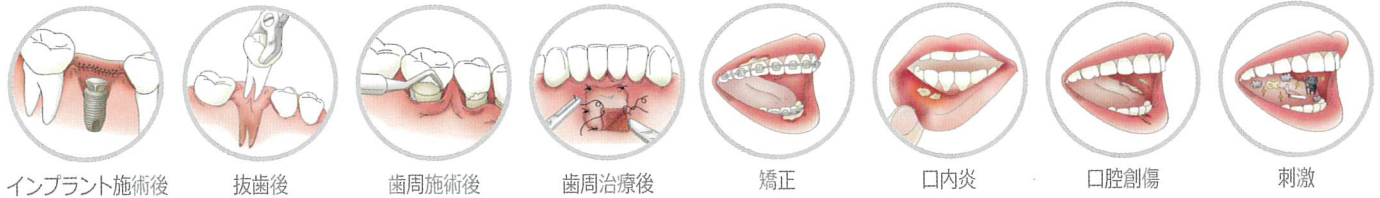

What is Ora-Aid?

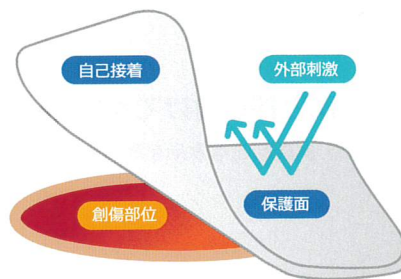

Ora-Aid は、非オイゲノールの口腔内保護パッドです。親水性ポリマーを用いた強力な接着で、ずれにくく、はがれる心配がありません。

特 長

- ▶ 食物、細菌およびタバコの煙から口腔内創傷を保護
- ▶ 口腔内創傷の止血および早い治癒を促す
- ▶ 二次感染を防ぐ
- ▶ 創傷部位の炎症を軽減する
- ▶ 創傷部位の痛みを軽減する
- ▶ 矯正治療による痛みの保護
- ▶ フッ素の消失または敏感な歯の保護
- ▶ 縫合糸によって引き起こされる刺激から舌を保護する
- ▶ 外科手術後の口腔内のリフレッシュ
- ▶ ミント風味が口臭を軽減
- ▶ 唾液による自己接着
- ▶ さまざまな形やサイズに簡単にカット
- ▶ 親水性ポリマーを用いた強力な接着
- ▶ 安全で使いやすい
- ▶ ビタミンE含有

アプリケーション




使用方法



1. 創面を消毒液または生理食塩水にてきれいに洗浄してください。




2. 外装を開封し、本品を取り出します。

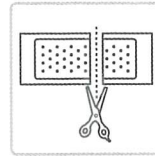

3. 必要に応じて適当なサイズに切ってください。



4. 剥離面を剥がし、接着面を創面に合わせ貼り付けてください。

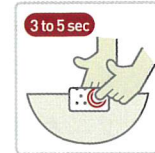

5. 軽く 3～5 秒ほど押し付けてください。

※ 誤嚥防止のため、就寝前には本品を取り外してください。

主な主成分・材料 *非ステロイド品

【接着面】 *創傷部位面

粘膜付着性合成セルロース、ビタミン E、ミントなど韓国薬局方、USP（米国薬局方）の規格に適合している原材料を使用。

【保護面】

水不溶性合成セルロース（飲み薬のカプセル等に使用されるもので万が一飲み込んでも胃で完全分解される材料）、その他韓国薬局方、USP（米国薬局方）の規格に適合している原材料を使用。

【商品保護フィルム】 *貼付後すぐに剥離

ポリエチレンテレフタレート（PET）

製品一覧

25×15 mm (2 枚入り)



50×15 mm



製品番号	サイズ	包装 (/ 箱)
TBM-0B25	25×15 mm	2 枚入 / 袋 × 20
TBM-0B50	50×15 mm	1 枚入 / 袋 × 20

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1 日比谷

マルヤマ歯科商店

TEL0794-85-6649 FAX0794-85-6650

注意事項



本品はシングルユース製品であり、使用は一回限りとし、再使用はしないでください。

- ・ 本品使用後、腫れ、アレルギー反応、胃や感染症の兆候があった場合は、担当医師に相談してください。
- ・ 本品に損傷または汚染が見られる場合は、絶対に使用しないでください。
- ・ 出血の深い傷には使用しないでください。
- ・ 12 歳未満の子供には使用しないでください。
- ・ 誤嚥防止のため、就寝前には本品を取り外してください。

* Ora-Aid の癒着は 6 時間以上続きますが、実際の使用時間は口腔環境によって異なります。

製造販売元：

コアフロント株式会社
COREFRONT

Tel: 03-5579-8710 <http://www.corefront.com>
Fax: 03-5579-8711 E-mail: desk@corefront.com
東京都新宿区市谷本村町 2-11 外濠スカイビル 4F

医療機器製品販売届出番号：13B1X10100000058

Made in Korea

お問い合わせ：



株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所：〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35
TEL: 06-6773-3333(代)
東京営業所：〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2
TEL: 03-3835-2653(代)
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21
TEL: 092-575-6060(代)
URL: <http://www.momose-dm.co.jp/>