

今までの歯ブラシの保存の仕方では、歯ブラシに細菌がいっぱいです。

歯ブラシ
洗浄剤

歯ブラシもスッキリきれいに！

TOOTH BRUSHES

POWER *Cleaner*

歯ブラシ パワークリーナー

細菌を
強力除菌

特長

- 1 歯ブラシに付着した
口腔内細菌を強力除菌
- 2 ミント効果で消臭
- 3 強力な洗浄効果
- 4 1袋で1日～3日使用できます
- 5 ポーラス加工の為どこからでも
簡単に袋が切れます

内容量:30包



TOOTH BRUSHES
POWER *Cleaner*

歯ブラシ パワークリーナー

電動歯ブラシヘッド・歯間ブラシにも対応


ご使用方法

- 1 歯ブラシ使用後よく水洗いする。
- 2 約100ccの水又はぬるま湯に
1袋を入れてよく混ぜて溶かします。
- 3 洗浄剤の中に30分以上～一昼夜浸けて下さい。
- 4 よく流水で洗浄して十分にすすいでから
歯ブラシを御使用下さい。

パワークリーン検査で
実証された高い除菌力

歯周病菌、虫歯菌、カンジタ菌
黄色ブドウ球菌、その他口腔内細菌

厚生労働大臣登録検査機関 LC環境検査センター調べ

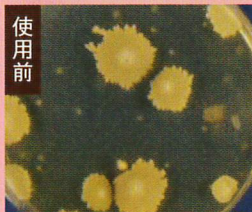

使用前



使用后

細菌がいる状態

細菌がない状態

急性経口毒性試験=安全性立証
(一般財団法人日本食品分析センターによる試験結果)

ご注意

洗浄剤や溶液を口や目の中に入れてください。万一入った場合十分に水で洗い流し、医師にご相談下さい。洗浄液が衣類にかかると色落ちの恐れがあります。付着したら直ちに水洗いして下さい。袋の中で固まっていた場合にも性能は劣化致しません。よく溶かしてお使いください。お子様の届かないところへ保管して下さい。高温多湿とならない涼しい場所に保管して下さい。歯ブラシ洗浄目的以外に使用しないで下さい。歯ブラシは定期的にお取替えてください。

成分

過硫酸塩、クエン酸塩、その他

製造元 株式会社ユニバル ISO13485:2003認証取得
販売元 サンエス石膏株式会社 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5階
TEL:03-5283-6201(代表)

発売店名

有限会社 マルヤマ歯科商店