


モックアップでも



魅せる

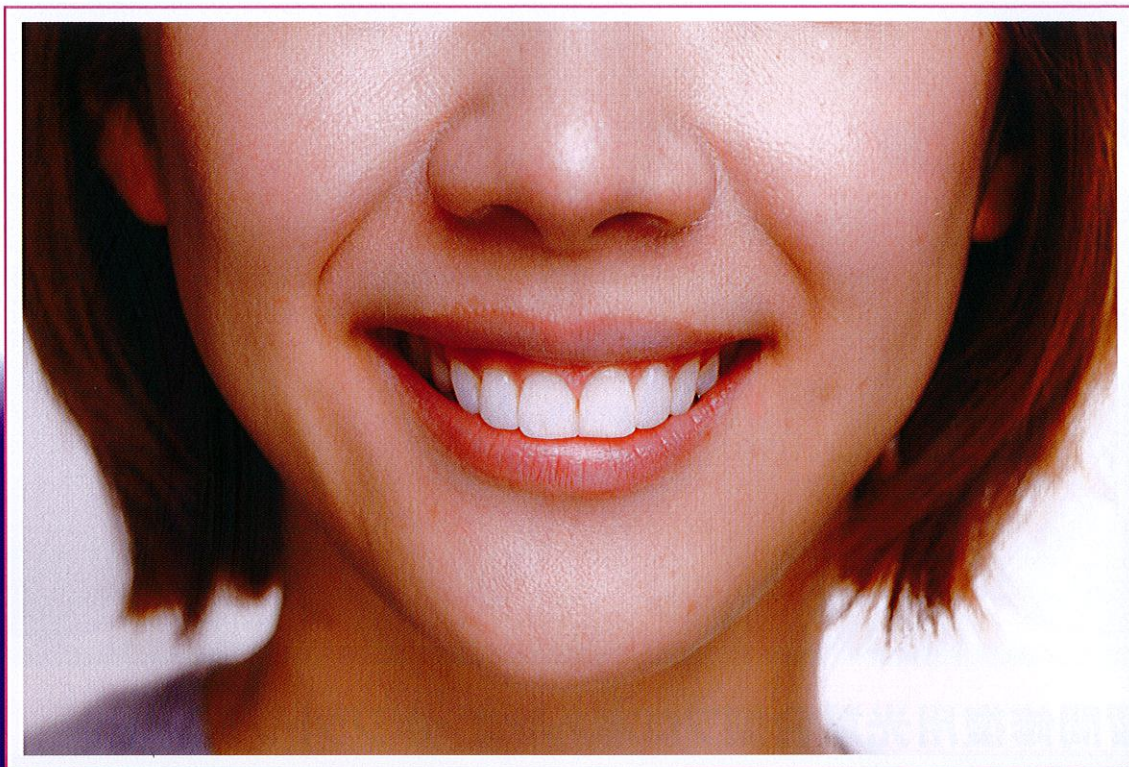

REVEAL

リビール

接着性ベニアプロビジョナルレストレーションシステム



本システムは、リビールコンポジットレジンならびにリビールクリアマトリックスからなり、
Dr.Edward A.McLaren(UCLA 審美歯科卒業研修センター長)がビスコ社と共同開発した審美修復時に用いるモックアップ材料です。

最終補綴物を装着するまでの中・長期の暫間修復期間でも維持できる耐久性を有しています。

暫間修復期間中において患者が満足できる審美性を追求した材料で、最適な口腔機能性を精密に把握することができ、高精度な最終補綴物の装着に寄与します。

複模型用親水性ビニルシリコン印象材 リビールクリアマトリックス



リビールクリアマトリックスは、VPS（ビニルポリシロキサン）を主成分とした暫間修復物作成に用いる親水性ビニルシリコン印象材です。細部を明瞭に印象採得できます。透明な印象材のため、注入したフロアブルコンポジットレジン『リビール』を口腔内外にて光重合することができます。

物理的特性


操作時間 1分30秒
硬化時間 2分30秒

オートミキシングタイプの透明印象材！

細部を明瞭に印象採得！
リビールを用いたインジェクションモルディング！

透明な印象材のため、
印象材上からリビールを光重合可能！

強く審美的なモックアップが完成！

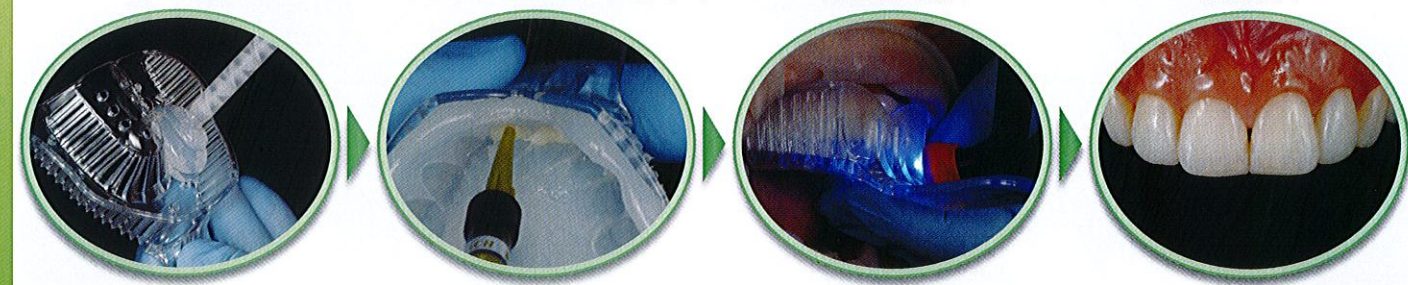

口腔外準備




術前。




診断用ワックスアップ模型を作成します。




既製透明トレーもしくは個人トレーにリビールクリアマトリックスを注入します。

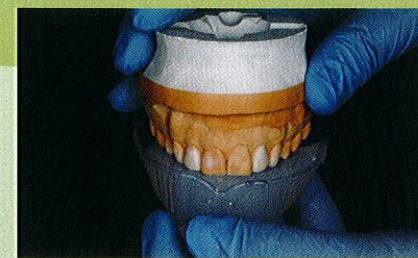

リビールクリアマトリックスを注入した既製透明トレーに診断用模型を正確に適合させます。

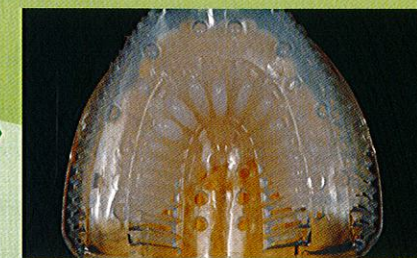

硬化するまで保持します。

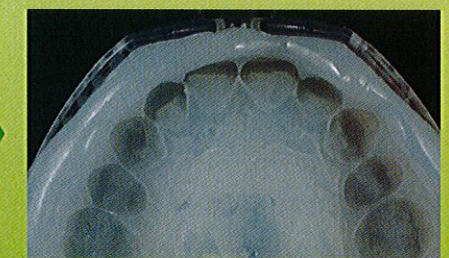

リビールクリアマトリックスによる印象面。余剰クリアマトリックスをトリムし除去します。

審美・暫間修復用光重合型フロアブルコンポジットレジン リビール




高強度

耐久性

操作性

審美ベニアモックアップ

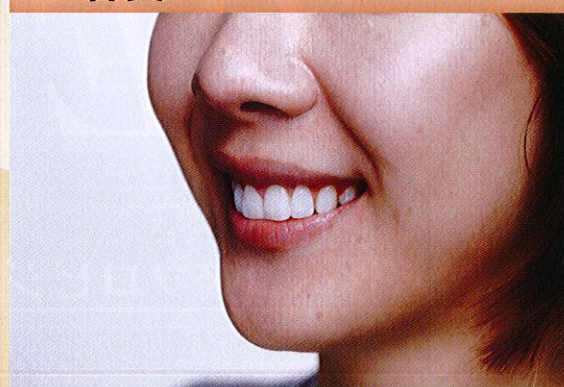

リビールは、光重合型審美・暫間修復用フロアブルコンポジットレジンです。リビールクリアマトリックスに注入しやすいフロアブル特性を有しながら、ナノフィラーが配合されており、マイクロハイブリッドコンポジットレジンと同等の物理的特性、研磨性を有しています。光重合型のため、化学重合型と比較して重合時間を短縮できます。シリンジタイプのため、操作性に優れています。追加築盛およびリペアが可能です。

物理的特性

引張強さ 49MPa
圧縮強さ 333MPa
曲げ強さ 111MPa
曲げ弾性率 6.1Gpa
パーコル硬さ 94/93 (TOP/BOTTOM)


シェード A1、ブリーチ

照射時間 20秒間 (500mW/cm²)


口腔内作業



暫間期間に応じて、スポットエッチングします。

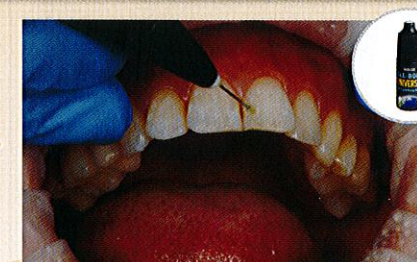

接着部位以外および歯肉縁等に分離材を適用します。接着部位に接着材の製造業者の指示に従って、接着処理を行います。

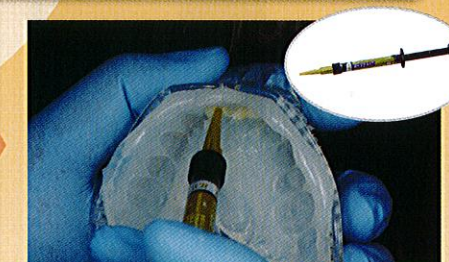


リビールを、リビールクリアマトリックスに注入します。



リビールを注入した既製トレーを口腔内の正確な位置に適用し、リビールを各歯面あたり各20秒間光照射します。



既製トレー撤去後。形態修正および研磨します。

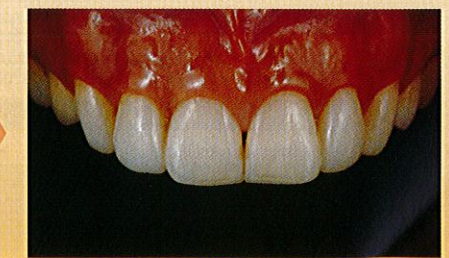

術後。

臨床写真ご提供：代官山アドレス歯科クリニック 大河 雅之 先生

【マクラレン先生はBonded Functional Esthetic Prototype (BFEP) (接着機能審美性プロトタイプ) をモックアップ、テンポラリー、プロビジョナルなど異なる新しい歯科用語として提唱しています。】

複模型用VPS 透明印象材 リビールクリアマトリックス



内容

- ・リビールクリアマトリックス カートリッジ×2本
- ・ミキシングチップ(グリーン)×6本

歯科医院様参考価格: ¥9,900

医療機器届出番号: 13B1X10098040018
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料

審美・暫間修復用光重合型 フロアブルコンポジットレジン リビール



●リビール（シリンジ A1 2本入）

内容

- ・リビール A1 1.5g×2本
- ・リビールチップ 2本

●リビール（シリンジ プリーチ 2本入）

内容

- ・リビール プリーチ 1.5g×2本
- ・リビールチップ 2本

歯科医院様参考価格: 各 ¥9,000

医療機器認証番号: 227AGBZX00103000
管理医療機器 歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ

関連製品

オールボンドユニバーサル




内容

- ・オールボンドユニバーサル(6mL) 1本

歯科医院様参考価格: ¥12,500

オールボンドユニバーサルキット

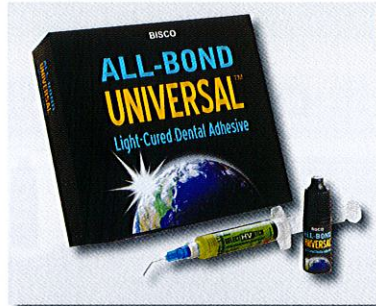


内容

- ・オールボンドユニバーサル(6mL) 1本
- ・セレクトHVEッチ(シリンジ 5g) 1本
- ・シリンジチップ(ダークブルー 22G) 15本
- ・アプリケーター(オレンジ レギュラー) 50本
- ・キングウェル(ディスポーザブル 2穴) 45個

歯科医院様参考価格: ¥15,000

セレクトHVエッチ

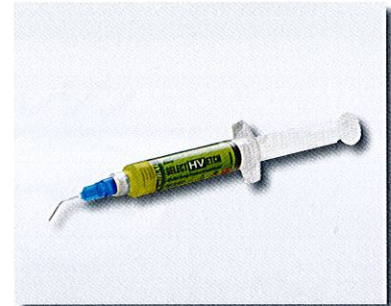

内容

- ・セレクトHVEッチ(シリンジ 5g) 1本
- ・シリンジチップ(ダークブルー 22G) 15本

歯科医院様参考価格: ¥2,500

オールボンドユニバーサル: 医療機器認証番号: 225AGBZX00057000 管理医療機器 歯科用象牙質接着材、歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、
歯科レジン用接着材料、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯科用知覚過敏抑制材料
オールボンドユニバーサルキット: 医療機器認証番号: 225AGBZX00087000 管理医療機器 歯科用象牙質接着材キット
セレクトHVエッチ: 医療機器認証番号: 225AGBZX00067000 管理医療機器 歯科用エッチング材

本紙に掲載されている価格は2016年3月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造業者: BISCO, Inc. (ビスコ インク社) 製造国: アメリカ合衆国(USA)

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

製造販売業者 EIKO CORPORATION

販売業者 株式会社モリムラ

株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

株式会社モリムラ

本社: 〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
大阪営業所: 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-15
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は

有限会社 マルヤマ歯科商店