



歯科充填用コンポジットレジン

ビューティファル キッズ

ゼロフロー ローフロー ペースト

Official partner



短時間勝負の子供の充填 ビューティファル キッズでバチッと決めよう


月

日

曜日

当番

操作性の異なった
3種類を
ラインナップ

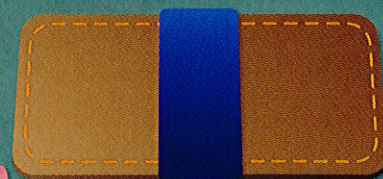

SHOFU INC.

ビューティフィル キッズは操作性にこだわってます。

子供は唾液も多く、大人のように口を開けていられない…
時には治療に非協力的なこともありますよね。
ビューティフィル キッズは短時間で充填できるよう、
操作性の異なる3種類のコンポジットレジンラインナップしています。


ビューティフィル キッズ ゼロフロー

ゼロフロー

流動性 付形性
◀ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ▶

ピタッととまる ゼロフロー

- 思い通りの立体的な付形が可能

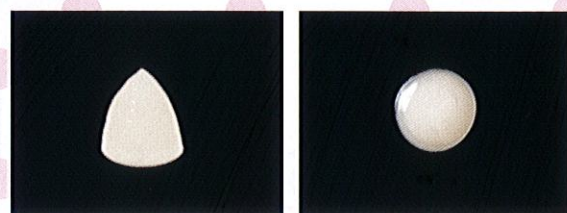

排出60秒後(水平)

排出60秒後(垂直)

ビューティフィル キッズ ローフロー

ローフロー

流動性 付形性
◀ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ▶

少し流れる ローフロー

- 適度な形態維持性とバランスのとれた流動性



排出60秒後(水平)

排出60秒後(垂直)

ビューティフィル キッズ ペースト

ペースト

採取した形のまま充填できる ペーストタイプ

- 先端部が細く、適量採取できるワンプッシュシリンジ。採取した形のままスピーディーに充填が可能。

■ビューティフィル キッズ ペースト


ノズル径 約2.6mm

■当社従来品ペーストタイプ

ノズル径 約5.0mm


高いX線造影性のため、充填後の経過観察も安心

ビューティフィル キッズのフロアブルタイプは、従来のフロアブルレジンよりも高いX線造影性を有していますので、咬翼法(バイトウイング法)による隣接面の診査でも充填部位が明瞭に確認できます。う蝕の進行が早い乳歯でも充填後の経過観察を安心して行えます。

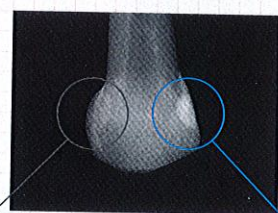

明瞭に観察可能なX線造影性

●X線造影性(対アルミニウム%) (代表値)

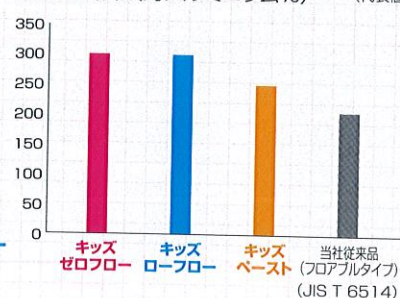


当社従来品
(フロアブルタイプ)

キッズ
ローフロー

乳歯の色調にマッチング

エナメル質が薄く白っぽく見える乳歯に適合しやすい不透明性を有する色調を再現できます。


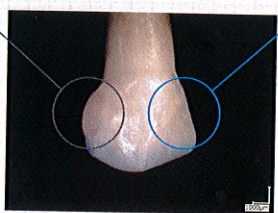


良好な色調適合性

充填後もフッ素徐放とリチャージ

ビューティフィル キッズに配合のS-PRGフィラーは、充填後も安定したフッ化物イオンを長期にわたって徐放することを確認しています。また、フッ化物配合の歯磨きペーストによるホームケアで、充填物にフッ素がリチャージされます。

●フッ素リリース&リチャージ能 (代表値)

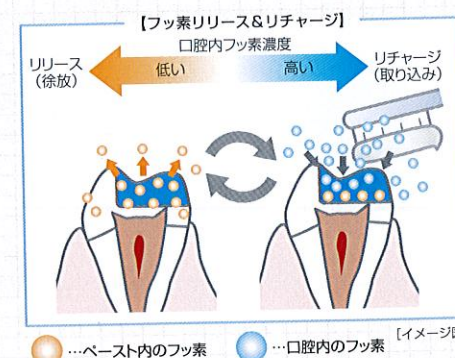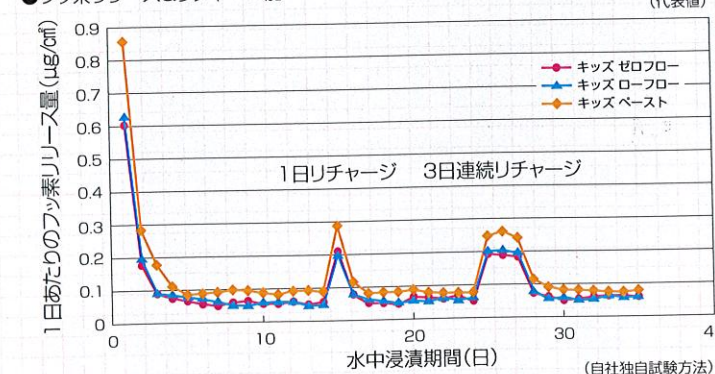

月

日

曜日

当番

こだわってます。

子供は唾液も多く、大人のように口を開けてられない・・・
時には治療に非協力的なこともありますよね。
ビューティフィル キッズは短時間で充填できるよう、
操作性の異なった3種類のコンポジットレジンラインナップしています。

パッケージもこだわったビューティフィル キッズ

「オレンジのキッズペースト」、「キッズのあか」、「みず玉のあお」と準備をされるスタッフの方に伝えやすく、
収納ケースから取り出す際もわかりやすい視認性です。



一目で分かりやすい
パッケージにしました




スタッフの方にも
分かりやすい
シリンジラベル

判別しやすい
天面ラベル




摩耗しやすく、やわらかい乳歯の修復にも適した諸物性


■優れた耐摩耗性

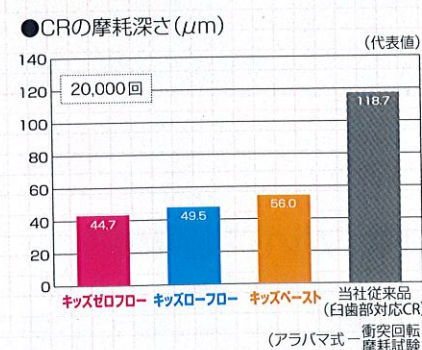

■対合歯摩耗の抑制

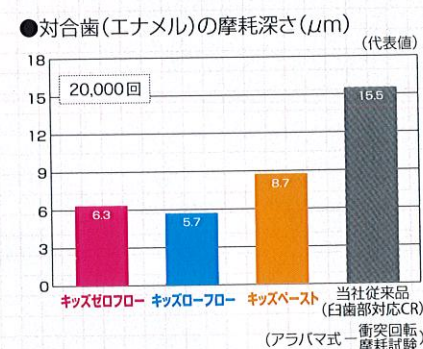

■臼歯部修復に適した高い物理的特性

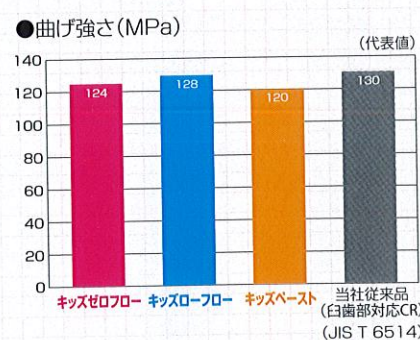


ビューティフィル キッズは口腔内環境の健全化に 寄与するS-PRGフィラーを配合

S-PRGフィラーって?

松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラーです。6種類のイオンリリースにより、抗プラーク付着性の他、酸中和能の発現や、エナメル質の脱灰を抑制する特長を有します。


**S-PRG
フィラー
II**
フッ化物を含む
6種類の
イオンリリース

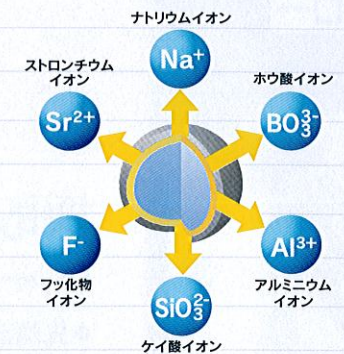

酸中和能の発現


S-PRGフィラーの働きにより、周囲環境を酸性領域から中性領域に移行させます。

ビューティフィル キッズの硬化体を乳酸水溶液(pH=4.0)に
浸漬したときのpHの変化 (代表値)

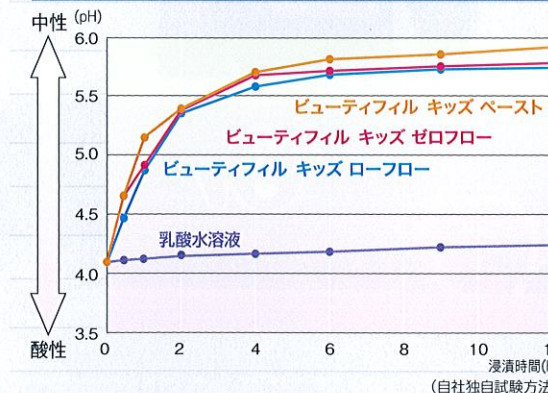


S-PRGフィラーの酸中和能試験

【試験方法】
pH指示液を滴下した乳酸水溶液(10ml)に、S-PRGフィラー 0.1gを
添加したときのpHの変化を示しています。(自社独自試験)

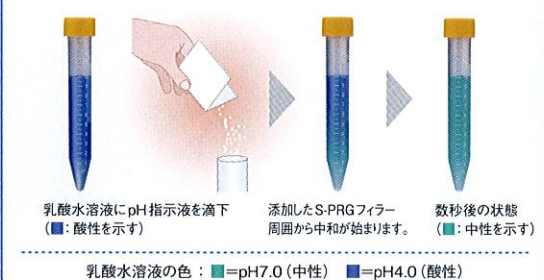

抗プラーク付着性

口腔内におけるプラーク形成状況の観察(24時間ブラッシングなし)

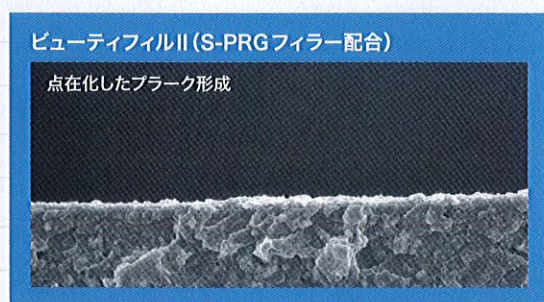

S-PRGフィラー配合コンポジットレジンの表面はだ液と接触することによって、マテリアルフィルム層ができ、これがコンポジットレジジン表面への細菌の付着および増殖を抑制し、成熟したプラークを形成しにくくすると報告されています。また、この層はブラッシング等により脱離するものの、再度だ液との接触によって形成され、持続的にプラークの成熟化を抑制すると報告されています。

(参考: 朝日大学 歯学部歯科保存学分野/第117から123回日本歯科保存学会報告)

S-RPGフィラーについて詳しく知りたい方はこちらのサイトをご覧ください。 <http://www.giomer.jp/>

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティフィル キッズ	歯科充填用コンポジットレジン	一般医療機器 医療機器認証番号 228AFBZX00024000


包装・価格



ビューティフィル キッズ
ゼロフロー
(付属品:ニードルチップ5個付)
【色調】乳歯色
2.2g 1本…¥2,800



ビューティフィル キッズ
ローフロー
(付属品:ニードルチップ5個付)
【色調】乳歯色
2.2g 1本…¥2,800

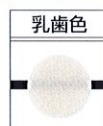

ビューティフィル キッズ
ペースト
【色調】乳歯色
3g 1本…¥2,900



印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。

関連製品

●歯質にやさしいシーラントシステム



光重合型小窩裂溝封鎖材
ビューティシーラント
セット…¥8,000

●マルチに使用できるオールインワンアドヒージブ



光重合型一液性ワンステップボンド
操作性、スピードを重視する方に
ビューティボンドマルチ
セット…¥14,000

●歯科用知覚過敏抑制材/歯面コーティング材




PRGバリアコート
セット…¥10,000

●フッ素のリチャージに



フッ素配合 口腔ケアジェル(薬用歯磨)
メルサーージュ クリアジェル
メルサーージュ クリアジェル **キッズ**
各60g 1本…¥560
(標準患者価格¥700)

●脱灰がマイルドな歯面コンディショナー

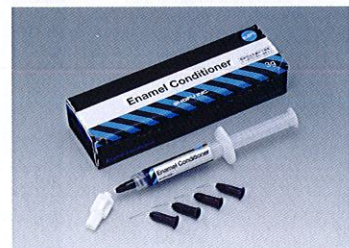

松風エナメルコンディショナー
3.0g…¥2,100

取扱い店

有限会社 マルヤマ歯科商店

カタログに記載の価格は2016年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。
ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。