

SD ニュークイックミニバーナー

SD NEW Quick mini burner

全て国内製造の強みを生かした
万全のアフターサービス

特徴

ON OFF着火ボタンが片手操作で取扱える圧電着火付き

エア調整レバーで先端が細い炎、太い炎調整可能

横にしての使用時に角度がつくためロウ、ワックス等火口に入りにくい構造

火口の部分のセラミックが内蔵された為旧タイプと比べ破損しにくい

付属のスタンドを使用すれば自在の角度で使用できる

ガス入れ過ぎ防止機能付き(取扱説明書参照)

¥9,800 (税別)




一般医療機器 歯科用バーナー 届出番号 13B3X00243000031

オールラウンドに使えるハンディートーチ



横にしての使用例

チェアサイドにてバイトワックスの軟化が行える。

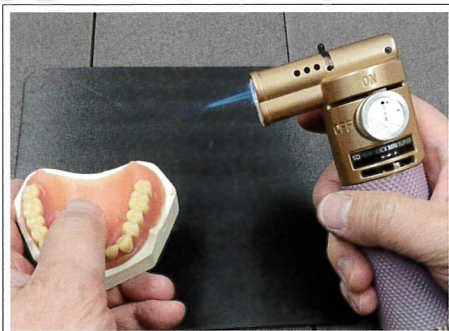


歯肉形成の使用例

口内義歯の歯肉形成が行える。火口セラミックが内蔵された為、旧タイプと比べ破損しにくい構造。



ブリッジのロウ着使用例

小さいブリッジのロウ着は机の上で移動せずに行える。

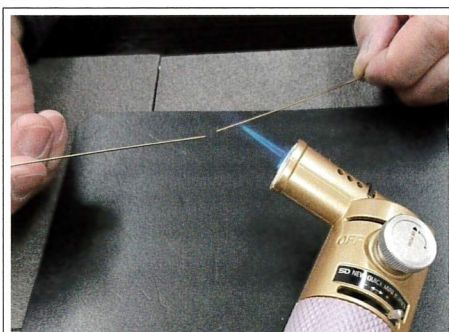

ロウ着使用例

火口が角度をつけて使用できる為ロウ、ワックス等が入りにくい。

大容量
お徳用サイズ!



詰替え用ボンベ(220g)
¥980(税別)

仕様

重さ	275g
燃焼時間	約35分
火炎温度	1,100℃~1,200℃

⚠ 注意事項

- ※本製品を寝かせて使用する場合は、ワックスが火口に落ちないようにご注意ください。故障の原因になります。
- ※ボンベの注入時間は入れすぎるとガスが液化する為、故障の原因になります。(約5秒間が目安です)
- ※炎が高温度の為、(1,100℃~1,200℃)特に下に向けて使用した場合火口本体部分が高温になるため、火傷に注意してください。

販売元 SD サンデンタル株式会社

<http://www.sundental.jp>

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前4丁目3番9号

TEL:06-6245-0950 FAX:06-6245-7690
TEL:03-3836-9347 FAX:03-3836-2090
TEL:092-482-2318 FAX:092-482-2339

製造元 有限会社 秋山歯科器具製作所

有限会社 マルヤマ歯科商店