

キャンペーン期間

2024.7.22 ▶ 8.20

〈期間・数量限定〉

# G-プレミアム ボンド 新規採用・ご愛用感謝 キャンペーン



平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。  
この度、「G-プレミアム ボンド 新規採用・ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

『G-プレミアム ボンド 2本包装 (NEWボトル)』とキャンペーンセット品

『グレースフィル ゼロフロー U (ユニバーサル) 1mL』1本を組み合わせて価格にてご提供!



1ボトルで

様々な症例に活躍の

「マルチユース」

多目的光重合型1液性ボンディング材

## G-プレミアム ボンド 2本包装 (NEWボトル)

包装・希望医院価格●1函:G-プレミアム ボンド (5mL) 2本=¥29,870 管理医療機器 226AABZX00098000

各種用途で  
使用できます

- CR充填修復
- 象牙質レジンコーティング
- 知覚過敏抑制
- 口腔内リペア
- コア (直接法) の歯面処理
- レジンセメントの歯面処理

### キャンペーンセット品



1本

盛れる!

隔壁から咬合面まで使用可能

ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン

## グレースフィル ゼロフロー U (ユニバーサル) 1mL

希望医院価格 ¥2,890

色調●=U (ユニバーサル)

包装●1包:1mLシリジ1本、フィリングチップニードルタイプ1個、エレファントニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個

管理医療機器 229AABZX00014000

### ジーシー ジーセム ONE EM / ジーセム ONE neo の前処理として 「G-プレミアム ボンド」が使用できるようになりました

■ 支台歯の前処理



#### G-プレミアム ボンド

New

十分な  
操作時間

10秒放置

5秒乾燥

#### 接着強化プライマー

スピーディーな  
タッチキュア



光照射あり


光照射なし

● 光照射により接着する支台歯以外の余剰セメントの除去の操作が余裕を持って行えます。  
※ 最終硬化までの時間は、接着強化プライマーを使用した場合と同じです。

● 「タッチキュア効果」(界面の重合促進効果)が付与されており、強固に支台歯・窩洞に接着します。  
● すべての支台歯・窩洞に対応し、塗り分け不要です。


G-プレミアム ボンド	セットする補綴装置の種類	接着強化プライマー
— 不要	メタルクラウン    メタルインレー    メタルコア	— 不要
○ 適宜 形成・適合条件等、 強固な接着を必要とする症例	ジルコニア    セラミックス	○ 適宜 形成・適合条件等、 強固な接着を必要とする症例
● 必要	CAD/CAM冠    CAD/CAMインレー	● 必要
× 使用不可 根管まで十分に 光が届かないため	レジンコア (間接法)	○ 適宜

■ 歯質接着強さ

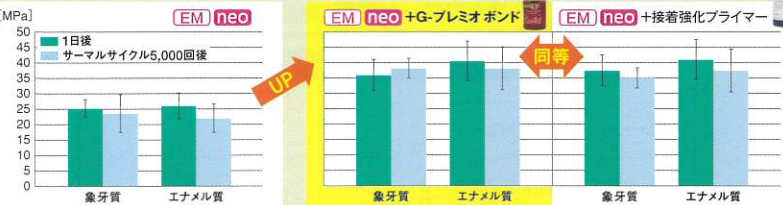

### ジーシー独自の光透過性と色あいの最適化により 天然歯に自然と馴染むCR充填が行えます

■ 16シェードの人工歯にU (ユニバーサルシェード) を充填

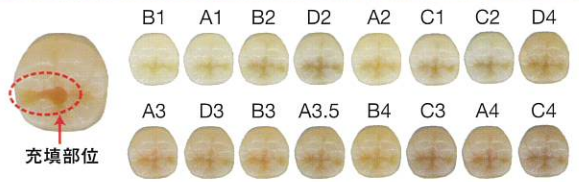

### グレースフィルシリーズは高い物性と長期的にツヤを維持!

■ 3点曲げ [MPa]



■ 耐摩耗 [μm]



■ 耐着色性 (カレーによる着色)



キリトリ

### ご注文書

キャンペーン期間: 2024年7月22日~8月20日

貴医院名 \_\_\_\_\_

ご住所 〒 \_\_\_\_\_

TEL ( ) \_\_\_\_\_

お取引販売店 **株式会社マルヤマ歯科商店**    ご担当者 \_\_\_\_\_ 様

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
G-プレミアム ボンド 2本包装 (NEWボトル) 1函	グレースフィル ゼロフロー U (ユニバーサル) 1mL 1本	

※ ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。  
※ 数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。