

医療ホワイトニング
TiON[®]

ティオン総合カタログ



Since 1921
100 years of Quality in Dental


ティオン オフィス / ティオンライト
ティオン ホーム ウィズ / ティオン ホーム プラチナ



医療ホワイトニングとは




歯科医療機関で

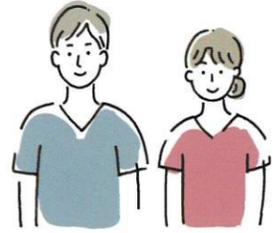

歯科医師・歯科衛生士^{※1}が


※1 歯科衛生士は歯科医師の指導のもと
医療ホワイトニング行為を実施

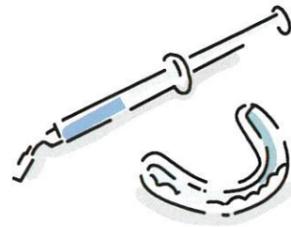

医療機器製品^{※2}を用いて

※2 過酸化水素または過酸化尿素含有製品/光照射器

歯の内部まで白くするホワイトニングです。

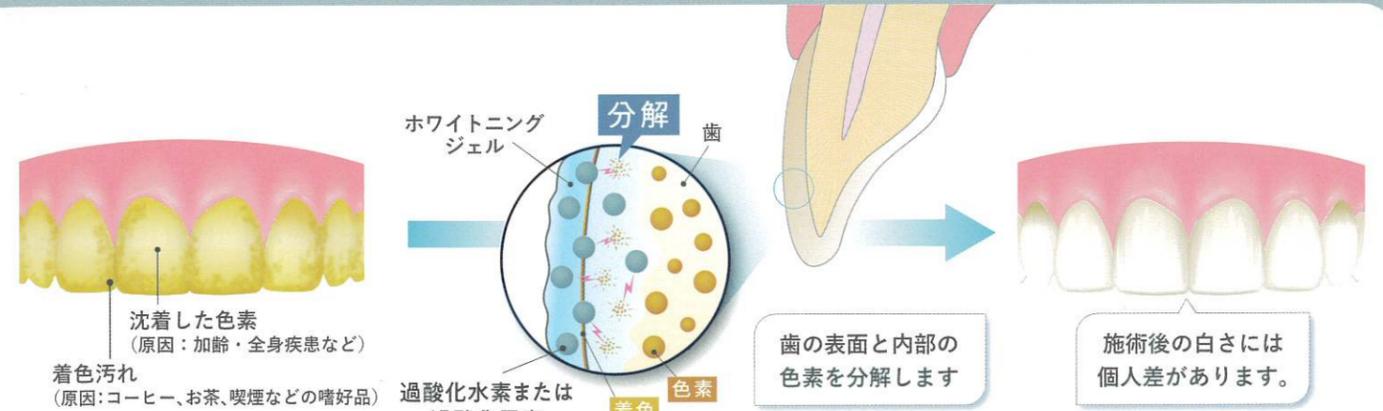


医療ホワイトニング・製品情報の詳細はコチラ



医療ホワイトニング ティオン[®]は 患者さんに合わせた提案ができます。

オフィスホワイトニング

歯科医療機関で行うホワイトニング。
歯の表面にホワイトニングジェルを塗布し、
光照射によりホワイトニング効果を促進させます。

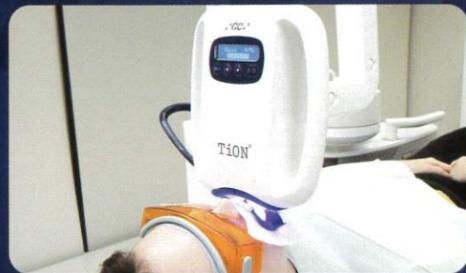

歯肉・粘膜保護 リアクター塗布 ホワイトニングジェル塗布 光照射 歯面清掃

ホームホワイトニング

ご自宅などで行うホワイトニング。
患者さんの歯列に合わせて作製したマウストレーと
ホワイトニングジェルを用いて歯を徐々に白くします。



マウストレーの作製 ホワイトニングジェルの注入 マウストレーの装着 マウストレーの取り外しと清掃 経過の確認

ティオン オフィス 過酸化水素濃度 35%
過酸化尿素濃度 30% **混和** 過酸化水素濃度 約23%

成分

ティオン ホーム
ウィズ

● 過酸化水素6%
(過酸化尿素約17%相当)

ティオン ホーム
プラチナ

● 過酸化尿素10%

- 施術時間: 約1~2時間 (1回の施術で最長3サイクル行う)
- 1回の施術で歯を白くする

時間

ティオン ホーム
ウィズ

● 時間: 標準60分 (最長90分)
● 回数: 10回 (10日間)

ティオン ホーム
プラチナ

● 時間: 最長120分
● 回数: 14回 (14日間)

- 1回で効果が得られる
- ホームホワイトニングよりも後戻りしやすい

特徴

- 時間をかけることで白さが長持ちする
- オフィスホワイトニングよりも効果を得るまでに時間がかかる

- 早く歯を白くしたい方 (例: 結婚式を間近に控えている方など)
- マウストレーを装着できない方 (例: 顎位が不安定、嘔吐反射があるなど)

おすすめ
の方

- 自分のペースで歯を白くしたい方
- 片顎のみ白くしたい方

オフィスホワイトニング

ティオン オフィス

低刺激で高いホワイトニング効果

過酸化水素濃度 35%
過酸化尿素濃度 30%
混合
過酸化水素濃度
約23%



豊田中央研究所が開発した
可視光応答型光触媒


V-CAT®のはたらき

光照射されると電子を放出し、過酸化水素と反応することで多くのヒドロキシラジカルが発生するため、着色物質を効率よく分解します。

臨床試験の結果


治験の概要 72名の変色歯を有する成人を対象に、本品を用いて漂白処置を行い、その安全性と有効性の評価を行った。治験の結果について、下記に示す。

- **安全性** 漂白処置中、漂白処置直後及び漂白処置から1週間後に問診・口腔内検査を行うことにより、安全性を評価した。その結果、有害事象として歯肉の白変が11症例、軽度の副作用(唇が乾燥してヒリヒリした)が1症例認められた。
 - 副作用なし: 71症例
 - 歯肉の白変: 11症例
 - 軽度の副作用: 1症例(乾燥により唇がヒリヒリした)
- **有効性** 漂白前後の歯の色を、明度順に並べたVITAPAN classical シェードガイドを用いてシェードテイキングを行い、その明度の差により有効性を評価した。その結果、全ての症例において歯の色調は改善され、漂白効果が認められなかった症例及び色調が暗くなった症例は無かった。
 - 3シェード以上改善: 57症例
 - 1~3シェード改善: 15症例

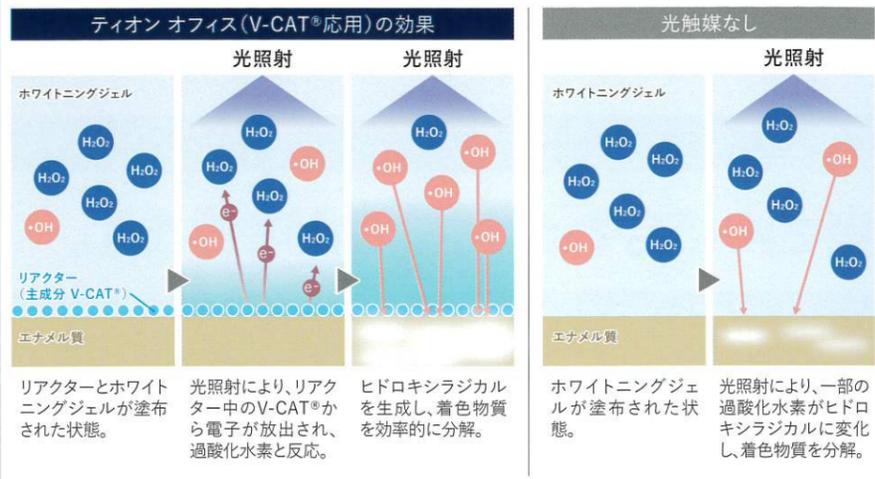

安全な光波長域で反応

一般的に、二酸化チタン光触媒は紫外線域の光にしかほとんど反応しませんが、V-CAT®(可視光応答型光触媒)は二酸化チタンの酸素の一部が窒素に置換されることで、可視光線域の光にも充分反応するため、歯科用照射器を用いたオフィスホワイトニングへの応用が可能となりました。

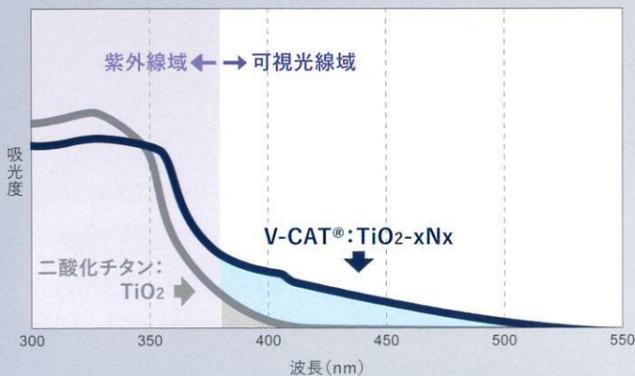


安全に使えるシステム

歯肉保護レジンにより、ホワイトニングジェルの歯肉への付着を防ぎます。また、ホワイトニングジェルはシリンジAとシリンジBを接合して混合し、ディスポーザブルファイバー付きチップから直接塗布できるため、安全にお使いいただけます。



短期間で
白くしたい方

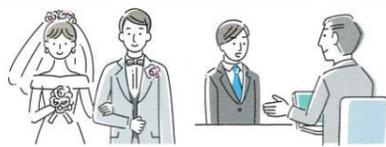

イベント(結婚式・面接等)が控えている

ティオンライト

オフィスホワイトニングのチェアタイムを短縮

Quickモード

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。




照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	特徴
NEW レジン	20秒	歯肉保護レジンの硬化に
NEW クイック	6分	短時間でやりたいケースに
ノーマル	12分	通常モード
ロー	12分	知覚過敏症状が心配なケースに

※Resin, Quickは自社従来品からの追加


照射光の波長域

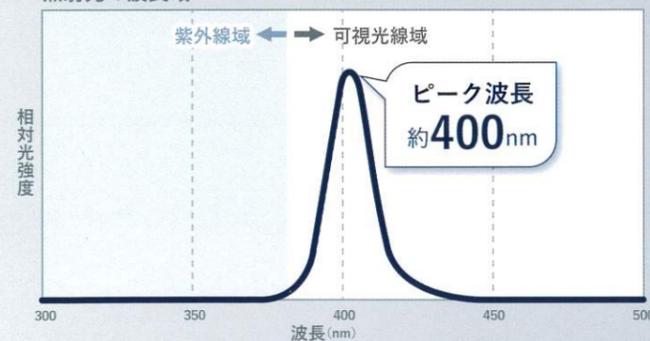

Resinモード

コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。

【照射例】

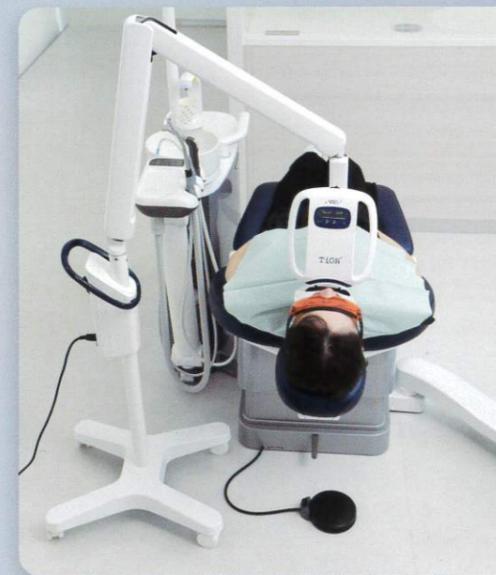

歯科用オフィスホワイトニング ティオン オフィス

包装・希望医院価格●
1面: オフィスホワイトニング材 シリンジA(1.0g) 1本、
オフィスホワイトニング材 シリンジB(1.0g) 1本、リアク
ター(2.0g) 1本、歯肉保護レジン(1.5g) 1本、ディスポ
ザブルティッシュ 1個、ディスポーザブルブラシ 2本、ディ
スポーザブルファイバー付きチップ 2個=¥5,800
【単品包装】
歯肉保護レジン
包装・希望医院価格●1面: 1.5g 1本=¥1,500
歯科用漂白材 ティオン オフィス
高度管理医療機器 22200BZX00785000

関連製品

- リップジェル**
包装・希望医院価格●
1面: 1個 8g=¥1,050
- リトラクター**
サイズ●2種: S, M
包装・希望医院価格●1面: 5個=¥3,200
歯科用開口器 リトラクター
一般医療機器 13B1X00155000199
- フェイシャルシート**
包装・希望医院価格●
1面: 100枚=¥3,600

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器) ティオンライト

包装・希望医院価格●
本体1台、マウスガード(ティオンライト用) 2個(本体装着
+付属)、保護メガネ(オーバークラスタイプ) コスモプ
ル/ティオンライト用 2個、六角レンチ(大)(小) 各1
個、電源コード 1本=¥555,000
【単品包装】
保護メガネ(オーバークラスタイプ)
コスモプル/ティオンライト用
包装・希望医院価格●1個=¥7,000
歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000312

仕様●

電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸法	本体高さ 1,550mm ベース部 510mm×430mm
重量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光源	5Wタイプ紫LED×5灯
出力ピーク波長	395~410nm
照射時間	10秒~20分
照射範囲	横70mm×縦30mm



要冷蔵 医薬用外劇物

ホームホワイトニング

ティオンホームの特長


有効成分が効率よく歯面に浸透

ジェルが水となじみやすく、有効成分が歯面に浸透しやすいため、効率よくホワイトニング効果を発揮します。

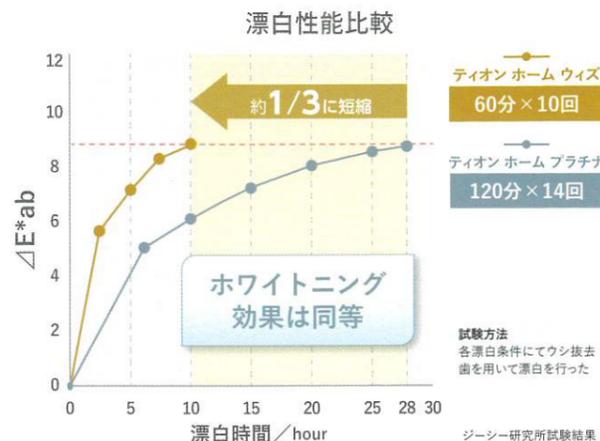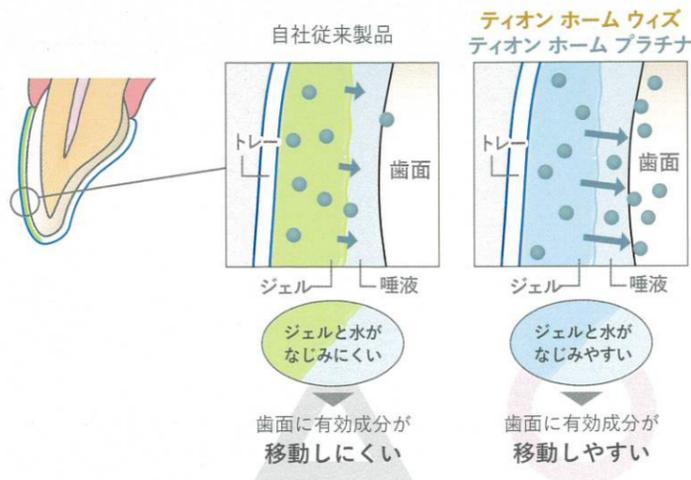

水に溶けにくく歯面に留まる

水に強く唾液に溶けにくいジェルが、歯面にムラなく広がり密着して留まるため、最後まで有効成分が作用します。

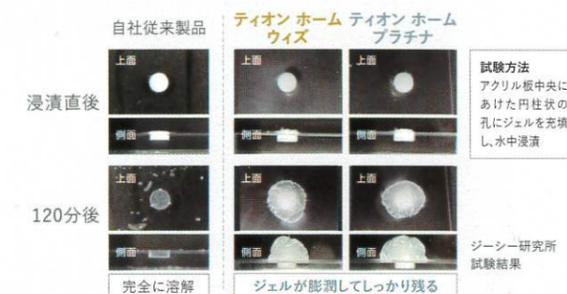


確認しやすい白色ジェル

ジェルがトレーからあふれ出た場合も、患者さんご自身が目で確認できるため、すぐにジェルを拭き取ることが可能です。



しなやかなで歯面にフィットするマウストレー

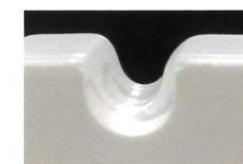

スチレン・インプレック共重合体のトレーシートにより、細部まで精度よく再現できます。



装着感がソフトで、透明性も高いため、違和感なく使用できます。

ティオンホーム ウィズ

高濃度で効率よくスピードホワイトニング

標準60分[※]×10日間

有効成分濃度が高い!

ティオンホーム ウィズ

過酸化水素6%
配合

(過酸化尿素約17%相当)



過酸化水素がダイレクトに漂白

着色汚れと沈着した色素を分解

※最長90分

すき間時間を活用したい方



ティオンホーム プラチナ


低濃度でじっくりマイルドホワイトニング

最長120分×14日間

ティオンホーム プラチナ

過酸化尿素10%
配合

過酸化尿素が過酸化水素と尿素に分解

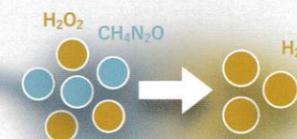

過酸化水素が漂白

着色汚れと沈着した色素を分解

知覚過敏症状に対して不安がある方



ホワイトバンド・ホワイトスポットを気にされている方

※早く白くなる方法では、一時的に目立ちやすくなる場合があります。



歯科用ホームホワイトニング

ティオンホーム ウィズ

包装・希望医院価格●
スターターキット 1面：ホームホワイトニング材(1.8mL) 4本、トレーシート2枚、トレーケース 1個、シールドガイド1枚、ペーパーバック 1袋=¥6,900

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
ティオン ホーム ウィズ
高度管理医療機器
30600BZX00056000

要冷蔵



ティオンホーム ウィズ
2シリンジ
包装・希望医院価格●
1袋：ホームホワイトニング材(1.8mL)2本=¥2,900

要冷蔵



ティオンホーム ウィズ
リフィル(10本)
包装・希望医院価格●
1面：ホームホワイトニング材(1.8mL)1本入×10=¥13,200

要冷蔵



ティオンホーム ウィズ
リフィル(20本)
包装・希望医院価格●
1面：ホームホワイトニング材(1.8mL)1本入×20=¥23,700

要冷蔵

ティオンホーム共通



ティオンホーム
トレーシート
包装・希望医院価格●
1面：10枚=¥3,800



ティオンホーム
トレーケース
包装・希望医院価格●
1面：10個=¥5,000

要冷蔵



ティオンホーム プラチナ
リフィル(20本)
包装・希望医院価格●
1面：ホームホワイトニング材(2.5mL)1本入×20=¥22,500

要冷蔵



ティオンホーム プラチナ
リフィル(10本)
包装・希望医院価格●
1面：ホームホワイトニング材(2.5mL)1本入×10=¥12,500

要冷蔵



ティオンホーム プラチナ
2シリンジ
包装・希望医院価格●
1袋：ホームホワイトニング材(2.5mL)2本=¥2,700

要冷蔵

歯科用ホームホワイトニング

ティオンホーム プラチナ

包装・希望医院価格●
スターターキット 1面：ホームホワイトニング材(2.5mL) 4本、トレーシート2枚、トレーケース 1個、シールドガイド1枚、ペーパーバック 1袋=¥6,500

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
ティオン ホーム プラチナ
高度管理医療機器
22900BZX00205000

歯面清掃に



フッ素入り歯面研磨ペースト
ジーシー PTCペースト
ルシェロホワイト

香味●グリーンシトラス
内容量●80g
包装・希望医院価格●1函：1本=¥2,400
歯面研磨材 ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト
一般医療機器 13B2X00124000003
製造販売元 日本ゼット株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



歯面清掃用カップ
ジーシー PTCカップII

包装・希望医院価格●1函：20個=¥1,060
歯磨カップ ジーシー PTCカップII
一般医療機器 13B1X00155000291

セルフケアに



薬用歯みがき類 医薬部外品
ルシェロ歯みがきペースト
ホワイトプレミアムケア

【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイトP
香味●グリーンシトラス
内容量●100g
包装・希望医院価格●1函：1本=¥1,600
包装・希望患者価格●1函：1本=¥2,200(税込)

※6歳未満の子供の手の届かないところに保管し、使用させない。

※本製品に配合している原料に由来してペーストが部分的に黄色く見える場合がございますが、品質に問題はありません。

製造販売元 日本ゼット株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

歯科医院用



歯ブラシ
ジーシー ルシェロ 歯ブラシ
B-10/B-20 ピセラ/W-10

毛の硬さ●B-10、B-20=M(ふつ)、S(やわらかめ)
W-10=やわらかめ

包装・希望医院価格●B-10 1函：20本(各色4本)=¥5,960
B-20 1函：20本(各色4本)=¥5,080
W-10 1函：6本(各色3本)=¥2,130

包装・希望患者価格●B-10 1本=¥390(税込)
B-20 1本=¥340(税込)
W-10 1本=¥450(税込)


ミネラル含有ペースト 化粧品
MIペースト

香味●5種：メロン、ストロベリー、パナソ、ヨーグルト、ミント
内容量●40g(35mL)
包装・希望医院価格●
各フレーバー 1函：1本=¥1,350
イントロダクトリーセット 1函：3本(ストロベリー/ヨーグルト/ミント)=¥4,050
アソートセット 1函：10本(各フレーバー2本)=¥13,500
包装・希望患者価格●1函：1本=¥1,780(税込)

※本製品には牛乳由来成分(カゼイン)及びパラベンが含まれておりますので、牛乳由来成分(カゼイン)及びパラベンに対してアレルギーを持つ方は使用しないでください。



CPP-ACP(リカルデント™)を配合した歯のクリーム

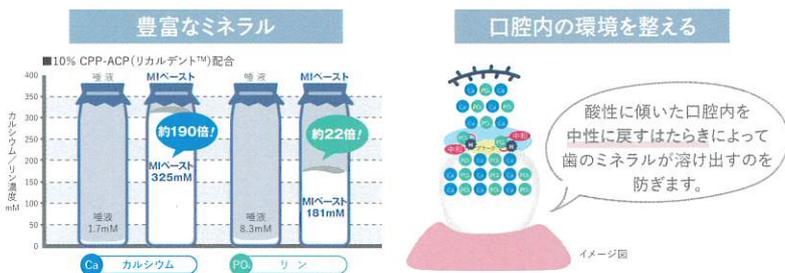

CPP-ACP(リカルデント™)とは?



ブリリカピアンコ

包装・希望医院価格●
パッケージ：本体1台、コントローラ1台、お知らせ受信機1台、ブリリカ用開口器S/SS各1個、保護めがね1個、収納袋1個、院内掲示用パネル、患者様用リーフレット50部、口唇・口腔シート化粧品リップリー1函10枚入=¥380,000

歯面漂白用加熱装置 ブリリカ ピアンコ
一般医療機器 特定保守管理医療機器 14B2X00036000008
発売元 株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13
製造販売元 株式会社東京技研横浜工場 横浜市都筑区東山田4-42-37

歯科用開口器 口角鉤 ダブルワイダー
一般医療機器 11B1X1000650D205
発売元 株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13
製造販売元 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28

※掲載情報は2024年9月現在のものです。
※希望医院価格には消費税は含まれておりません。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文または使用上の注意事項をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
ジーシー 公式アプリ
どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。