

# オラプラ液体包帯口腔用

液体包帯


口腔内の水分と反応して傷口を保護します。  
ステロイドを含まないため小児や多用途にご使用いただけます。



# Features

口腔粘膜の傷口保護に、「オラプラ液体包帯口腔用」という新たな選択肢です

- 軟膏タイプで、局所の傷口に使用できます
- ステロイドなどの薬剤を含んでいません
- 口腔粘膜に塗布すると、唾液などの水分と反応して保護膜をつくります
- 片手で簡単に折り曲げ開封できるカード型パウチ(イーゼースナップ)を採用し、衛生的です

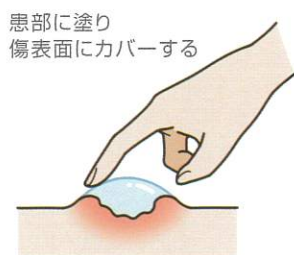

# How to Use


- 1 口すずぎ・手洗いをする
- 2 患部の唾液や水分を軽く拭き取る
- 3 容器を折り曲げ、指や綿棒などに取りる
- 4 患部に塗る




口すずぎ・手洗いなどを行い、口腔内の患部・手指などを清潔にしてください。



患部の唾液や水分をティッシュ・滅菌ガーゼなどで軽く拭き取ってください。

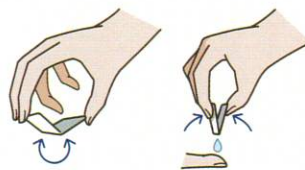

容器の吐出口の記載がある面を指や綿棒などに向け、容器をVの字に折り曲げて本品を取り出してください。

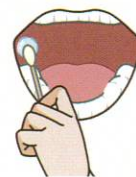

指や綿棒などにのせた本品を口腔内の患部に塗布してください。

# Specification

液体包帯  
オラプラ液体包帯口腔用

内容量 分包品(Easysnap)0.6g×5個/袋  
標準価格 780円 202080200  
希望患者価格 900円(税別)

販売名 オラプラ液体包帯口腔用  
一般的名称 液体包帯  
医療機器届出番号 13B2X00129000001  
医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)



●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。 ●掲載商品の標準価格は、2024年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。 ●ご使用に際しましては、製品の添付文書および使用方法を必ずお読みください。  
●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。  
製造販売 富士フイルム富士化学株式会社 東京都中央区京橋2-14-1兼松ビルディング  
発 売 株式会社ゼンリツ 大阪本社 大阪府吹田市墨江町3-33-18 〒664-8650 T 06.6380 2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161  
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020 (フリーコール)  
www.dental-plaza.com

株式会社マルヤマ歯科商店

PUB NO.M7905.1.2409.67.258G.I0/ZU 208530608