




クリアフィル®マジスティ®ESフロー を用いた臨床症例

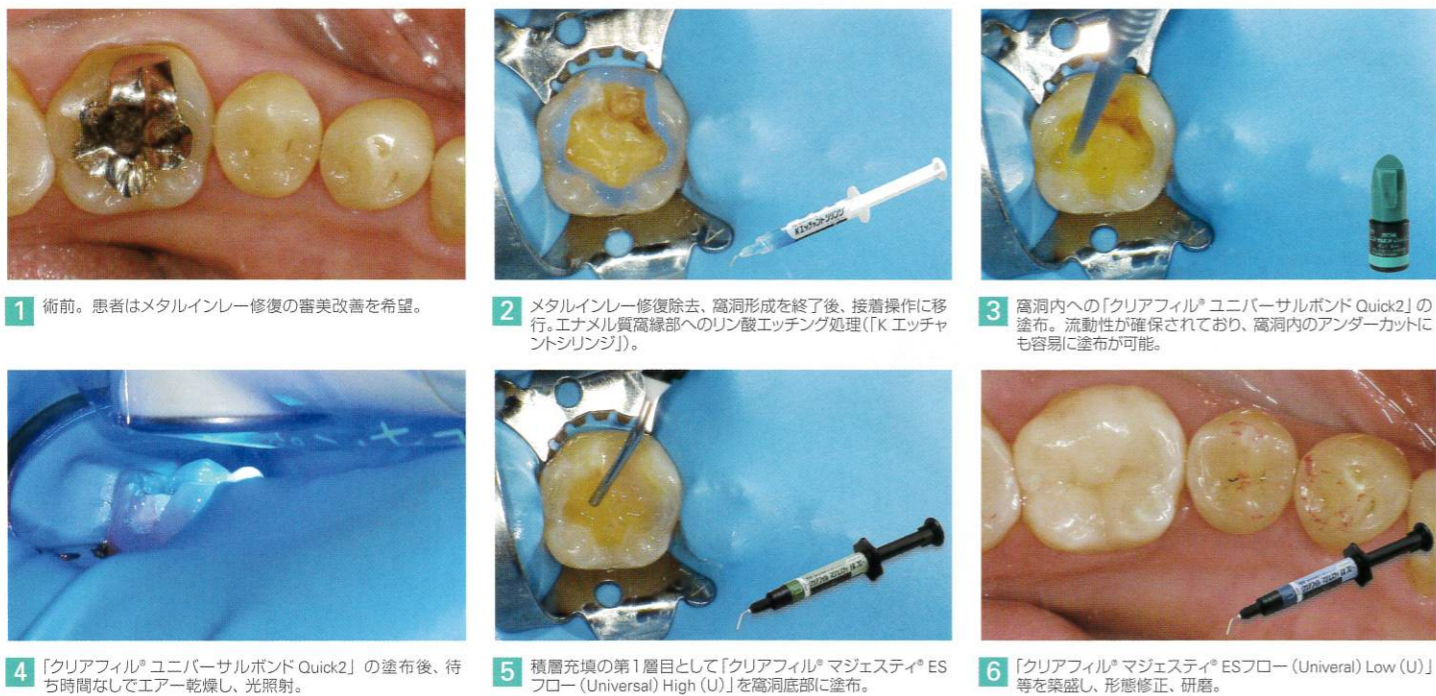

1 術前。患者はメタルインレー修復の審美改善を希望。
 2 メタルインレー修復除去、窩洞形成を終了後、接着操作に移行。エナメル質窩縁部へのリン酸エッチング処理（K エッチャントシリンジ）。
 3 窩洞内への「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick2」の塗布。流動性が確保されており、窩洞内のアンダーカットにも容易に塗布が可能。
 4 「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick2」の塗布後、待ち時間なしでエアードライ、照射。
 5 積層充填の第1層目として「クリアフィル®マジスティ®ESフロー（Universal）High（U）」を窩洞底部に塗布。
 6 「クリアフィル®マジスティ®ESフロー（Universal）Low（U）」等を築盛し、形態修正、研磨。

提供：田代歯科医院 田代浩史先生

販売名 クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick2 一般的名称 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）（歯科用シーリング・コーティング材） 医療機器認証番号 305ABBZK0012000 医療機器の分類 管理医療機器（クラスII）
 販売名 クリアフィル®マジスティ®ESフロー 一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号 224ABBZK00170000 医療機器の分類 管理医療機器（クラスII）
 販売名 K エッチャントシリンジ 一般的名称 歯科用エッチング材 医療機器認証番号 226ABBZK00080000 医療機器の分類 管理医療機器（クラスII） 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社

マジスティ ESフローの流動性を活用することでライニングから充填作業もスムーズに行うことができます。



その他、UBQ2とマジスティ ESフローを使用したケースレポートを掲載中！

田代歯科医院開業
田代 浩史 先生



クリアフィル®マジスティ®ESフロー Universal

周囲の歯質に親和する色調設計により天然色に色調親和します。

CRの色調親和や流動性の種類・ボンディング材に接着耐久性があるのはCR充填をする上で様々なメリットをもたらすね！



○シェードラインナップ

	Super Low	Low	High
U	●	●	●
UD	●	●	●
UOP	●	●	●
UW ^{※2}	●	●	●

VITA®主要シェードに対応（A1, A2, A3など）
 濃色（A3.5/A4をカバー）
 オペーク色（A2D, A3Dに近い）
 ホワイトニングした歯、乳歯色（W, XWに近い）

※1 VITAはVITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germanyの商標です。
 ※2 本製品の中で最も明度が高い色調です。



クリアフィル®マジスティ®ESフロー ご愛顧感謝キャンペーン



平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、【実施期間】数量限定 2024.10.21>>>11.20 『クリアフィル®マジスティ®ESフロー ご愛顧感謝キャンペーン』を企画いたしました。下記対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

Low お得な3本パック!

クリアフィル®マジスティ®ESフロー **Low Universal** バリュースタック(U 3本組)

■標準価格 11,000円 202440605
 ●レジン充填材(Low)(U) 2.7g(1.5mL)×3本組
 ●付属品 ニードルチップ(N)(5個)×3組、ニードルチップキャップ(5個)×3組 ※本品は、単品3本を組み合わせています。

×3本

特別価格にてご提供!

Super Low Low High

クリアフィル®マジスティ®ESフロー **Universal** 単品各色

■標準価格 各4,520円
 202440610~202440612
 202440600~202440603
 202440620,202440621

●レジン充填材 各2.7g(1.5mL) SuperLow [U, UD] Low [U, UD, UOP, UW] High [U, UD, UOP]
 ●付属品 ニードルチップ(N)(5個)、ニードルチップキャップ(5個) ※本品は、袋包装です。

特別価格にてご提供!

Super Low Low High

クリアフィル®マジスティ®ESフロー **単品各色**

■標準価格 各4,520円
 202430301~202430312
 202430341~202430344
 202430321~202430325

●レジン充填材 各2.7g(1.5mL) ●付属品 ニードルチップ(N)(5個)、ニードルチップキャップ(5個)

特別価格にてご提供!

販売名 クリアフィル®マジスティ®ESフロー 一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号 224ABBZK00170000 医療機器の分類 管理医療機器（クラスII）



友だち追加はこちら

特別価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
 新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 MORITA

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
 東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
 お問い合わせ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222.8020(フリーコール)
 www.dental-plaza.com

株式会社マルヤマ歯科商店