

義歯床用短期弾性裏装材

ティッシュコンディショナー フレクトン 新発売キャンペーン

期間 2024年10月21日～11月20日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、「ティッシュコンディショナーフレクトン」の新発売を記念いたしまして、

「ティッシュコンディショナー フレクトン新発売キャンペーン」を企画いたしました。

期間中「ティッシュコンディショナー フレクトン セット」を特別価格にてご提供いたします。

ぜひ、この機会をご利用ください。

貼りかえ
簡単

お好みの
フロー感に
調整可能

低アルコール
4%

選べる
2カラー！
ピンク ホワイト



義歯床用短期弾性裏装材
ティッシュコンディショナー
フレクトン セット

Tissue Conditioner
FLECTON

NISSIN MORITA

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

製造 **NISSIN**
京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001

発売 株式会社 **モリタ**
大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>


www.dental-plaza.com

株式会社マルヤマ歯科産庄




やさしく、やわらかな
ティッシュコンディショナー

調整可能なフロー感 粉計量容器に記された線を参考にして、粉量を調整することでお好みのフロー感に調整いただけます。



実線 1.50g
調整しやすい
やわらかタイプ
義歯辺縁の修正や
クリアランスの狭い印象時には、
高フローのやわらかタイプ




点線 1.65g
厚盛りしやすい
しっかりタイプ
訪問診療で座位のできない
患者さまや義歯との隙間(不適合)
が多いときは厚盛りできる
しっかりタイプ

粉計量容器

“短時間で”はがしやすい

べたつかず、一体となつてはがせるため
簡単に貼りかえることができます。

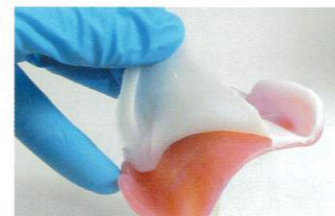

低刺激でやさしい

低アルコールで苦みが少なく、ピリピリするといった
患者さまへの負担がありません。

機能印象ができる

高い印象採得能があり、機能印象を取ることができます。

使用方法

※使用前には注意事項をお読みください。

STEP 1 粉液計量



液計量スポイト
1目盛(1mL)
+
粉計量容器1目盛

粉計量容器1目盛に対して
液1mLを計量します。

[目安] — やわらかタイプ 1.50g
----- しっかりタイプ 1.65g

STEP 2 混和と盛り上げ



粉液がなじむ程度に、約20秒混和
してください。その後、義歯床粘膜面
に盛り上げ、表面を整えて口腔内に
装着します。

STEP 3 口腔内保持



適切な咬合位で咬合させます。
約5分間口腔内で保持します。

STEP 4 トリミング



口腔内から取り出し、余りな本材を
ナイフやハサミで除去します。

処置も操作時間も
短時間に!
※弊社従来品比べ

べたつかず、短時間で
トリミングが可能に!
※弊社従来品比べ

義歯床用短期弾性裏装材 ティッシュコンディショナー フレクトン

粘膜調整 / 機能印象 / 暫間裏装

- 色調 ピンク/ホワイト
- セット内容 粉100g、液100mL、スバチュラ
混和器、スポイト、粉計量容器
- 単品(粉) 粉100g、粉計量容器
- 単品(液) 液100mL、スポイト
- 標準価格
セット(ピンク/ホワイト) 6,800円 204510030 (P/W)
粉材(ピンク/ホワイト) 4,430円 204510031 (P/W)
液材 2,330円 204510032



関連商品

ティッシュコンディショナーにも使える
入れ歯洗浄剤
「キラリ泡タイプ」が
オススメ!!

口腔内装置洗浄剤
キラリ泡タイプ

■標準価格
100mL 1,000円 204530569
希望患者価格 1,180円



フルーツ
ミントの香りの
もっちり泡