




# DENTURE DISK

デンチャーディスク

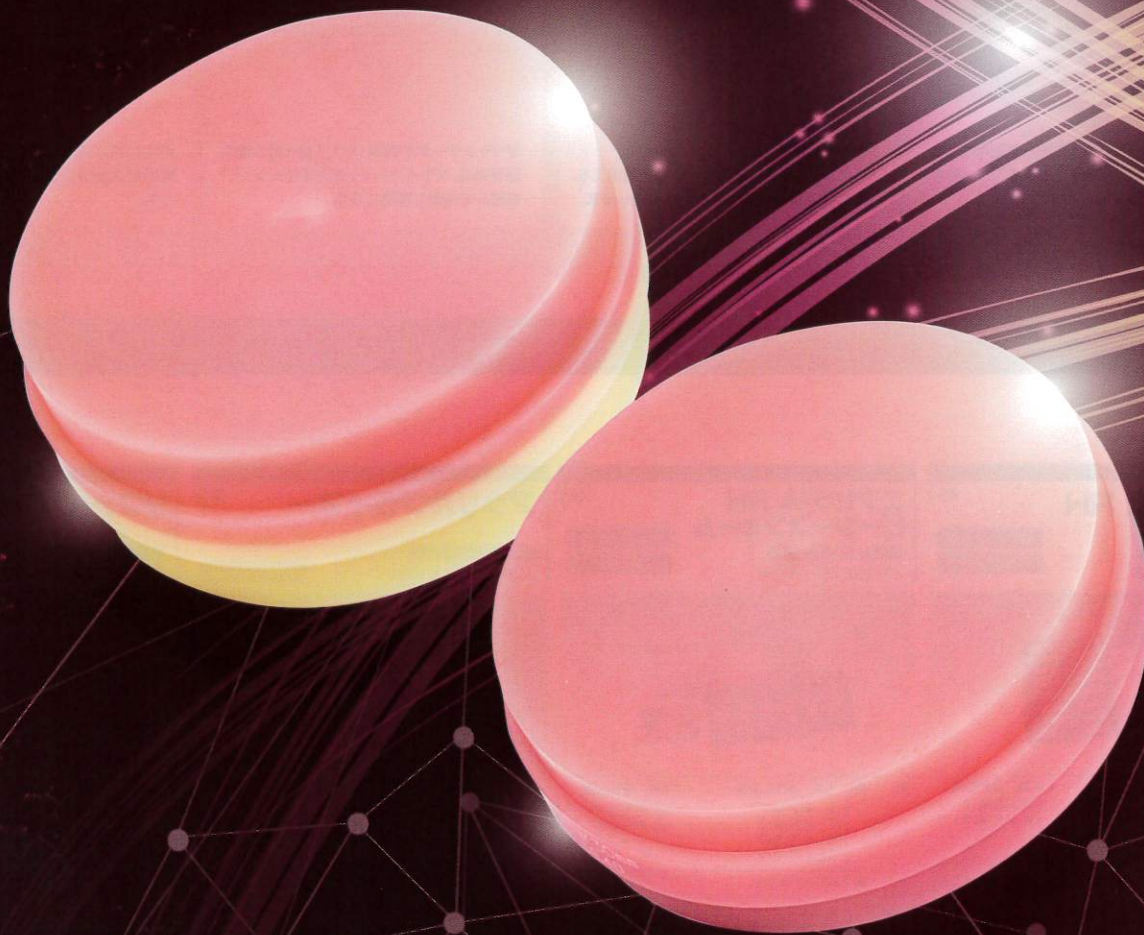

## 歯科切削加工用レジン材料 デンチャーディスク

薬事情報 | デンチャーディスク  
管理医療機器  
医療機器認証番号 304AFBZX00046000  
歯科切削加工用レジン材料

用途 義歯床用レジン材料

色調 Vピンク  
サイズ T25mm・T30mm (φ98.5mm)



標準価格 **¥6,000** (税別)

色調 Vピンク+A3  
サイズ T35mm (φ98.5×35mm)  
配色 Vピンク:20mm / A3:15mm



標準価格 **¥10,000** (税別)



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

## 安定した物性と作業効率の向上

- 理想的な環境条件と適切な材料比率で重合されているため、粉液練和による重合と比較し、安定した物性と品質が得られます。
- デザイン後は加工機によるミリングで工程が自動化されるため、義歯製作の中間作業が簡略化されます。
- データを保管することで、すぐに同形状での再製作が可能です。



## 作業工程例

維持孔を付与した人工歯<sup>\*1</sup>、専用プライマー<sup>\*2</sup>、即時重合レジン<sup>\*3</sup>を併用することで、適切な接着強度を得られます。(JIS T6501に適合)

<b>[材料選択]</b>  デザインデータ及び加工データを作成します。用途に応じてディスクとサイズ(厚み)をご選択ください。	<b>[切削加工]</b>  材質はPMMAです。DLCコートのミリングバー <sup>*4</sup> で切削加工を行い、加工後はサポート部分を除去します。	<b>[人工歯接着・固定]</b>  デザインデータでを使用した人工歯と加工後の義歯床を、プライマー <sup>*2</sup> 、即時重合レジン <sup>*3</sup> を用いて接着し固定します。	<b>[研磨・調整]</b>  適法に従い研磨を行います。歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材 <sup>*5</sup> のご使用も可能です。
--	--	---	---

CADソフトウェア/CAMソフトウェアの詳細につきましては、ご購入されておりますメーカー様へお問い合わせください。

## 関連商品

<b>エフセラ®-A RH</b> ※1 硬質レジン歯・前歯 20200BZZ00105000 管理医療機器 健保適用	<b>エフセラ®-A RH</b> ※1 ピーシーズフォーム 硬質レジン歯・前歯 20200BZZ00105000 管理医療機器 健保適用	<b>アクリルプライマー</b> ※2 義歯床用接着材料 223AFBZX00101000 管理医療機器	<b>リファインブライト</b> ※3 急速硬化性常温重合レジン 220AFBZX00069000 歯科用アクリル系レジン 管理医療機器
<b>エフセラ®-P RH</b> ※1 硬質レジン歯・白歯 20200BZZ01490000 管理医療機器 健保適用	<b>エフセラ®-P RH</b> ※1 ピーシーズフォーム 硬質レジン歯・白歯 20200BZZ01490000 管理医療機器 健保適用	<b>山八CAD/CAM</b> ※4 <b>ミリングバー DLCコート2</b> 歯科用研削器材 23B1X10001C09067 一般医療機器	<b>グロッシーコート</b> ※5 歯科レジン系補綴物 表面滑沢硬化材 230AFBZX00020000 管理医療機器
形態 上顎 全16形態 下顎 全8形態 S 4・5・6・7 LA 4・5・6・7 T 4・5・6・7 LB 4・5・6・7 C 4・5・6・7 SS 4・5・6・7 色調 A2・A3・A3.5 包装単位 6歯揃/バー 6歯揃×16枚入(96歯)/箱 全形態セット 6歯揃×24枚入(144歯)/箱	形態 上顎 全16形態 下顎 全8形態 S 4・5・6・7 LA 4・5・6・7 T 4・5・6・7 LB 4・5・6・7 C 4・5・6・7 SS 4・5・6・7 色調 A2・A3・A3.5 包装単位 単品部位ケース 12歯入/箱 トータルケース 各12歯入×6部位(72歯)/箱	【特徴】 ●脱脂後、人工歯基底部に塗布。熱可塑性床用レジン(アクリル・ポリカーポネート系)と人工歯の接着力を高め、レジン歯脱落の不安を低減。 ●流し込み用床用レジンと人工歯の接着力向上にも効果があります。 ※人工歯のコンポジット層には接着効果はありません。 ●義歯修理(即重レジン装着)の前処理液としても有効です。 包装単位 25ml	色調 ●②ピンク ●④LFピンク ●⑤クリアー ●⑥LFα ●③マーブルピンク ●⑦クリアーピンク ●⑧マーブルH ●⑨A2 ●⑩A3 ●⑪A3.5 包装単位 単品:粉末250g、涼材260ml スポイト付
形態 28・30・32 色調 A2・A3・A3.5 包装単位 8歯揃/バー 8歯揃×12枚入(96歯)/箱 セット・上顎・下顎	形態 28・30・32 色調 A2・A3・A3.5 包装単位 単品部位ケース 20歯入/箱 トータルケース 各20歯入×16部位(320歯)/箱	種別 歯下長(mm) シャンク径(mm) 全長(mm) 包装単位 φ3.0mm 16 4 52 1本/ケース φ2.0mm 16 50 φ0.8mmL 16 φ0.8mm 12 φ0.4mm 6	【特徴】 ●DLCコートの皮膜厚をプラスすることで、従来品と比較しPMMA加工時の耐久性が向上しました。 ●0.8L(ロングネックタイプ)により、深さのある加工物へ対応が可能です。 有効波長域 365~410nm 硬化時間目安 LEDキュアボックス プラス 3分 LEDトレーキュア 3分 ハイパーL-II 30秒 包装単位 15ml

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。  
●ご用命は…

株式会社マルヤマ歯科商店



製造販売元  
**山八歯材工業株式会社**  
 〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1  
 TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764  
 Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>  
 E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)