

歯科用色調遮蔽材料

# トクヤマ マスキングオペーカー

変色・着色  
金属色の遮蔽に  
これ1本



# 遮蔽性

## 背景色を効果的にマスキング

### 金属色・変色部位の遮蔽に



着色を確認



窩底部にトクヤマ マスキングオペレーターを塗布・硬化



エステライトユニバーサルフロー A2で積層充填



遮蔽材料を使用せず  
エステライトユニバーサルフロー A2  
のみで充填した場合

用途		
遮蔽	充填 (主にデンチン・エナメル)	
トクヤマ マスキング オペレーター	エステライト ユニバーサル フロー OPA2	エステライト ユニバーサル フロー A2
高	← 遮蔽性 → 低	
0.5mm	1mm	1mm
硬化体の厚み		

窩底部に薄く一層、  
背景色を効果的にマスキング

# 操作性

## 窩底部に馴染むハイフロー

伸びやすくムラがない、  
まんべんなく遮蔽




ハイフローの高い塗布性で  
窩底部に薄く均一に馴染む

### 操作ステップ




充填部の歯面清掃後

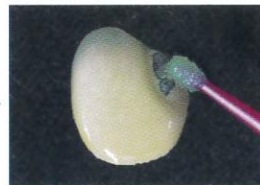

被着面の材質に応じた処理  
※画像はボンドマー ライトレスIIで処理



トクヤマ マスキングオペレーターを充填  
※1回の充填厚みは0.5mm以内とする

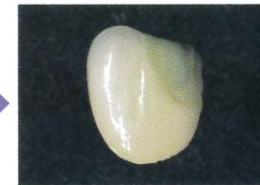

光照射後  
※800mW/cm<sup>2</sup>以上の光照射器で20秒を目安に光照射



通常に従いコンポジットレジン  
を積層、光照射。硬化後仕上げ/研磨。



歯科用色調遮蔽材料

### トクヤマ マスキングオペレーター

(管理医療機器) 認証番号306AFBZX00053000

- シリンジ ..... 3g(1.8mL) 1本
- トクヤマディスペンシングチップ ..... 2個
- 樹脂キャップ ..... 2個

標準医院価格 **¥4,700**

### 関連製品

### トクヤマディスペンシングチップ



標準医院価格

**¥2,500/50個**



※このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。価格は2024年10月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

## 株式会社トクヤマデンタル

■ご用命は

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00 (土日祝日を除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201  
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

## 株式会社マルヤマ歯科商店

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>