

汚れ防止成分  
(MPC)配合

# マウスガード 除菌・洗浄スプレー

# EX

MOUTH GUARD CLEANER

マウスガードを手軽に除菌・洗浄できる、ハンディータイプスプレーです。

除菌・洗浄力  
UP

スプレータイプ  
屋外でも手軽に  
使用

マウスガード樹脂に  
影響を  
及ぼしません

清潔感のある  
メディカルハーブの  
香り

ナイトガード(歯ぎしり防止装置)や3Dストレー(ドラッグリテーナー)、いびき防止装置、リテーナー/スプリントなどにも使用できます。


## 洗浄力UP

# ワンランク上の マウスガード除菌・洗浄スプレーEX

## 現行品との比較

人工汚垢を作製し、現行品とEXにて洗浄試験を行いました。残った汚れの重量を比較した結果、EXは汚れが少なく、現行品に比べEXは洗浄力が高い事がわかりました。

洗浄効果試験（現行品を100とする）N=5平均値（アース製薬試験）

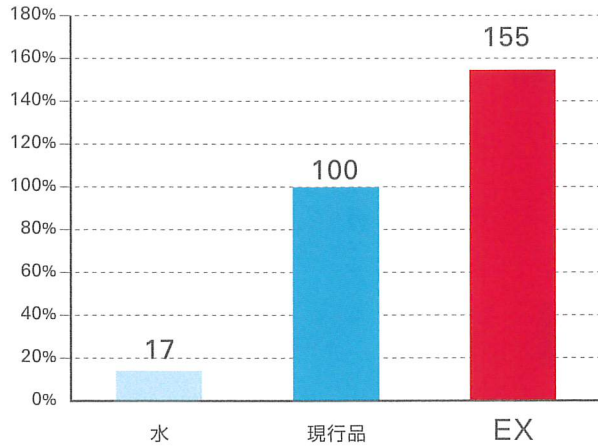

## 試験方法

- 人工汚垢スライドガラスの作製  
小麦粉、ラード、サラダ油を混合した人工汚垢を、スライドガラスに付着させた。
- 洗浄試験  
37℃程度の検体を入れたサンプルチューブに、(1)で用意したスライドガラスを入れ、振蕩した。その後スライドガラスをサンプルチューブから取り出し乾燥した後、重量を測定し、洗浄率として算出した。

## 使用方法



除菌・洗浄スプレー  
**マウスガード除菌・洗浄スプレーEX**  
アース製薬

マウスガードの使用前、使用後に使用するマウスガード用除菌・洗浄スプレーです。

■内容量 130mL

標準価格 1,000円 202320003

希望患者価格 1,200円(税別)

マウスガード以外の口腔内装置にも使用できます。



<開発アドバイザー> 日本大学松戸歯学部口腔健康科学  
顎口腔機能治療学分野  
准教授 鈴木浩司先生

●掲載商品の標準価格は、2019年9月24日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造 アース製薬株式会社  
東京都千代田区神田司町2-12-1 〒101-0048

販売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)

有限会社マルヤマ歯科商店

www.dental-plaza.com  
PUB M6715 1 1909 70 000YIT/IT 208530352