

コンポジットレジン研磨器材

歯科用研磨器材



Features

それぞれ特長が異なるため、症例に応じてお選び頂けます。



1ステップ ポリッシャー

1ステップ操作で簡単に研磨できます。微細なダイヤモンド粒子を含有しているため、ポリッシングペーストを別途使用しなくても充填修復物表面の光沢が得られます。

2ステップ ポリッシャー

粒度の異なるダイヤモンド粒子を含有した製品表面が「仕上げ」と「つや出し」の目的に沿って充填修復物を研磨することで、ワンランクアップの滑沢性が得られます。

研磨ブラシ

シリコンカーバイトでできた研磨粒子を含有したナイロンブラシ。コンポジットレジンの研磨の他に、ポリッシングペーストなしでプラークの除去もできます。



製品表面 (200倍拡大)

(画像提供:大阪歯科大学歯科保存学講座 非常勤講師 宮地秀彦 先生)



ホイール

ホイール形態 多様な患部に適用しやすく使い道が豊富

- 柔軟性が高く咬合面のように研磨しづらい部位にも使用できます。
- 充填修復物に優しく接触するため、表面構造を傷つけず温存しながら研磨します。



Cases



1ステップ、2ステップポリッシャーともに豊富な商品規格を持ち、症例に合わせて必要な形態をお選び頂けます。

トップグロス CA -1ステップ-



術前



トップグロス CAを用いて表面研磨



スモールポイント



カップ

トップブラシ CAを用いて追加研磨

オプション



術後

コンボグロス CA -2ステップ-



術前



グリーン(2-1)を用いて仕上げ研磨



ホイール(グリーン)



ライトグリーン(2-2)を用いてつや出し研磨



ホイール(ライトグリーン)



術後

(症例提供: 脳歯科医院 脇宗弘 先生)

How to use

使用方法を遵守することで光沢度や耐久性などの研磨効率が上がります。

品名	回転速度(rpm)	注水	研磨対象
■ トップグロス CA (1ステップ)	5,000 ~ 7,000 6,000 ← ホイール	要	コンポジットレジン フロアブル
■ コンボグロス CA (2ステップ)	10,000 ~ 12,000 6,000 ~ 8,000 ← ホイール	要	コンポジットレジン フロアブル ユニバーサル
■ トップブラシ CA	3,000 ~ 5,000	不要	コンポジットレジン フロアブル コンポマー グラスアイオノマーセメント

研磨による表面性状の変化



被研磨体表面 (200倍拡大)
(画像提供:大阪歯科大学歯科保存学講座 非常勤講師 宮地秀彦 先生)

Examples

トップグロス CA



カップ

コンボグロス CA



ホイール

トップブラシ CA



カップ

Line up

※オートクレーブ可 実寸

品名	ステップ	規格	商品コード	規格コード	入数	標準価格
トップグロス CA 	1	スモールポイント #	206290205 206290203	—	6 1	3,900円 700円
		ポイント カップ ディスク ホイール	206290198	2032 2035 2038 2039	6	4,200円
		ホイール	206290204		1	1,000円
		アソート	206290251		5	3,600円
コンボグロス CA 	2-1 仕上げ	スモールポイント ポイント カップ ホイール	206290199	1033 1032 1035 1039	6	4,200円
	2-2 つや出し	スモールポイント ポイント カップ ホイール		1133 1132 1135 1139		
	2-1,2	アソート(カップなし)		206290252		
トップブラシ CA 	—	カップ ポイント	206290200	1502 1501	5	2,500円

関連製品



クリアフィル® マジェスティ® ESフロー
内容:レジン充填材(各2.7g/1.5mL)
付属品:ニードルチップ(N)×5入、ニードルチップキャップ×5入
標準価格:各4,300円 202430341~202430344
202430301~202430312
202430321~202430325



クリアフィル® マジェスティ® ES-2
内容:レジン充填材(各3.6g/2.0mL)
色調:A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4,
D2, D3, XW, W, OA2, OA3, KA6
標準価格:各3,400円 202430020~202430039




クリアフィル® メガボンド® 2 キット
セット内容:プライマー(6mL)×1本、ボンド(5mL)×1本、
付属品:遮光板(C)×1個、混和皿(C)×1個、アプリケーションブラシ
(ファイン/シルバー)×50本
標準価格:17,500円 202430270



コンポジット3D フェージョンキットII
セット内容:3Dリテナーフェージョン(ブルー)S×1入、フェージョン
バンド 5種×5入、リングフォーセップス フェージョン×1入、フェー
ジョンウェッジ 4種×10入
標準価格:41,800円 206830003



ニッシン プラスチックストリップス
内容:研磨用ストリップ 150枚入(アソートは各50枚入)
規格:#280(グリーン/荒)、#600(イエロー/中荒)、#1000(ホワイト/
仕上げ)、アソート(#280、#600、#1000)
標準価格:6,300円 204510877280
204510877600
2045108771000
204510877ASS

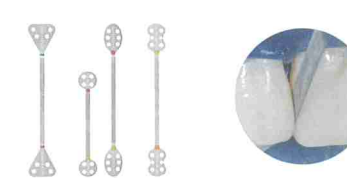

グリップストリップ
内容(粒度/厚さ単位:µm):コース(80/170, 40/110)
ミディアム(40/110)、ミディアムミニ(15/70)
ファイン(15/70, 8/60)3枚入
アソート(各規格1入、ミディアムミニ以外)
標準価格:5,300円 206230031~206230035

Specifications

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Units

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries

販売名: トップクロス CA 一般的名称: 歯科用ゴム製研磨材
医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号: 27B1X00109000343
製造: エデンタ 製造販売: 株式会社モリタ

販売名: コンボクロス CA 一般的名称: 歯科用ゴム製研磨材
医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号: 27B1X00109000342
製造: エデンタ 製造販売: 株式会社モリタ

販売名: トップブラシ CA 一般的名称: 歯科用研磨器材、歯科予防治療用ブラシ
医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号: 27B1X00109000344
製造: エデンタ 製造販売: 株式会社モリタ

販売名: クリアフィル®マジェスティ® ESフロー 一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器の分類: 管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号: 224ABBZ00170000
製造販売: クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653
販売: 株式会社モリタ

販売名: クリアフィル®マジェスティ® ES-2 一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器の分類: 管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号: 224ABBZ00119000
製造販売: クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653
販売: 株式会社モリタ

販売名: クリアフィル®メガボンド® 2
一般的名称: 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)
医療機器の分類: 管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号: 227ABBZ00114000
製造販売: クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653
販売: 株式会社モリタ

販売名: コンボジタイト 3D システム 一般的名称: 歯科用充填・修復材補助器具
医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号: 27B1X00109000236
製造: ギャリソン・デンタル・ソリューションズ 製造販売: 株式会社モリタ

販売名: ニッシン プラスチックストリップ 一般的名称: 歯科研削用ストリップ
医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号: 26B1X10008000030
製造販売: 株式会社ニッシン

販売名: グリップストリップ 一般的名称: 歯科研削用ストリップ
医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号: 27B1X00109000290
製造: セントリック 製造販売: 株式会社モリタ



製造販売

株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800. 222 8020 (フリーコール)〈歯科医療従事者様専用〉

製造 エデンタ

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

掲載商品の標準価格は、2021年1月21日現在のものです。
標準価格には消費税等は含まれておりません。
ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB : NO.M6300.2.2102.6B,750II.JPC/JPC 208530445

有限会社マルヤマ歯科商店