

# ジーシー テンプスマート

デュアルキュア型テンポラリーC&B用コンポジット

GC




Since 1921  
100 years of Quality in Dental

テンポラリー製作にオートミキシングの提案

TeC製作をコンポジットレジンで  
簡単に製作！

NEW BW (ブリーチングホワイト) が  
追加されました!

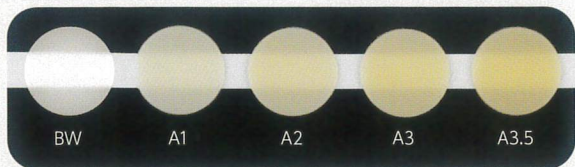

保険適用

カンタン操作  
×  
MMAフリー

材料を選ばず簡単に  
追加築盛やリペアー可能



▲ 製作例はコチラ ▲






# 簡単

## オートミキシングで簡単製作

テンプスマートは、オートミキシングタイプの暫間修復用コンポジット。常温重合レジンのように粉液の計量や混和、片付けが不要。ミキシングチップを装着して押し出すだけで気泡のない均一に練られたペーストが得られます。

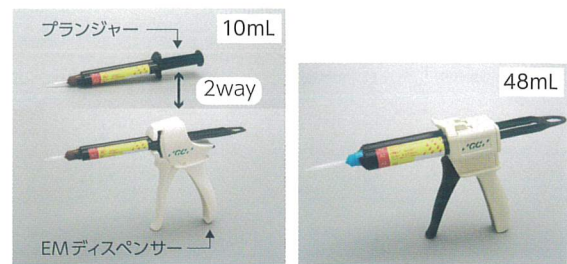

## 作業時間を大幅短縮

支台歯形成前に採得した印象を用いることで、形態修正や研磨時間を大幅に短縮でき安定したクオリティの高い暫間修復物が簡単に製作できます。またデュアルキュアタイプのため、最終重合を光照射で行うことにより硬化時間を短縮することができます。



## 印象材の種類を選ばず製作が可能

可塑性を含まないため吸熱されにくくアルジネート印象材、シリコーン印象材等、あらゆる印象材を使用することができます。

## 他の材料でも追加築盛やリペアーが可能


テンプスマート、常温重合レジン、フロアブルコンポジットレジンを使用することができます。

# 優しい

## MMAフリーで刺激臭なし

## 発熱量少なく患者への負担軽減


MMAを含まないコンポジットレジン組成の採用により、特有の刺激臭がありません。重合時の発熱量も自社常温重合レジンよりも少ないため、患者さんの負担が軽減されます。

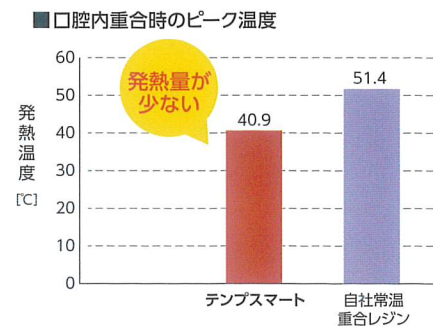

# 高い物性



## 高い適合性と高精度

自社常温重合レジンに比べて低収縮のため、高い適合性を発揮します。重合時の変形が少なく、単冠からブリッジまであらゆるケースで高い精度が保たれます。

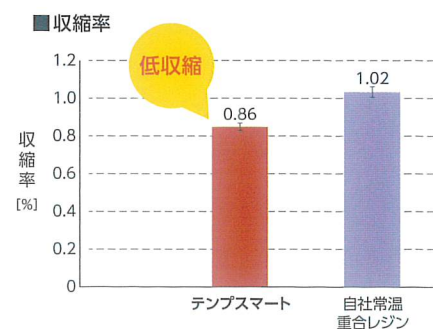

## 長期の使用にも最適

高い曲げ強度と優れた耐摩耗性、そして艶維持性を兼ね備えているため、装着期間の長いプロビジョナルレストレーション症例にも最適です。

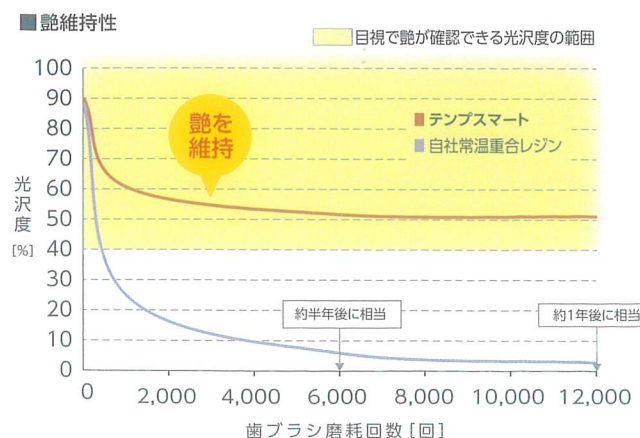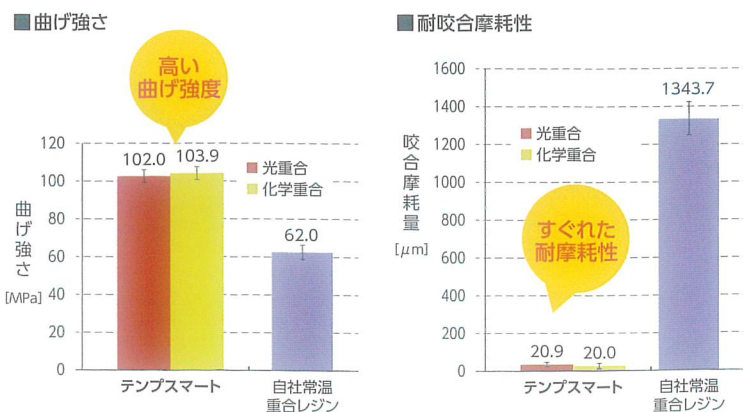

## 直接法による暫間修復物の製作

- 術前 支台歯を形成する前。
- 印象採得 支台歯を形成する前に印象を採得します。  
**アルジネート印象材も使えます**
- 支台歯形成 印象採得後に支台歯形成を行います。次にアンダーカットの除去、分離剤の塗布を行います。
- ペースト (テンプスマート) 注入 採得した印象 (コア) にペーストを注入します。
- 印象 (コア) を支台歯へ装着 ペーストを注入した印象 (コア) を支台歯へ装着します。(ペースト注入開始から45秒以内に装着)  
**45秒以内**
- 暫間修復物を支台歯から撤去 ペースト注入開始から2分~2分30秒の間に、硬化した暫間修復物を支台歯から外し余剰部を除去します。  
**2分**
- 最終重合 1歯当り5秒間咬合面から光照射します。光照射を行わない場合は、ペースト注入開始から5分以上待ちます。
- 仮着 形態修正・研磨・咬合調整を行い、仮着します。  
**2分30秒以内**

## 間接法による暫間修復物の製作

- 術前 スリーインサイズルで3歯ブリッジの症例。
- ワックスアップ 歯肉をカットし、落ち着いたところに診断用ワックスを製作します。
- 印象採得 透明シリコーン (エクザクリア) を用いてワックスアップの印象採得を行います。
- ペースト (テンプスマート) 注入 採得した印象 (コア) にペーストを注入します。
- 光照射 模型に圧接し光照射します。光照射を行わない場合は、ペースト注入開始から5分以上待ちます。  
**透明シリコーン (エクザクリア) は、レジンの流れが確認でき圧接したまま光照射が行えます**
- 仮着 形態修正・研磨・咬合調整を行い、仮着します。
- 最終補綴 イニシャルLISIプレスで最終補綴装置を製作。

## 追加築盛、リペアーの方法




※追加築盛・リペアー・ウォッシュの前に必ず新鮮面を出してください。(唾液が付着すると接着力が著しく低下します)  
※接着面積が小さい場合は、シランカップリング材 [G-マルチプライマー] との併用を推奨します。



デュアルキュア型テンポラリーC&B用コンボジット

# ジーシー テンプスマート

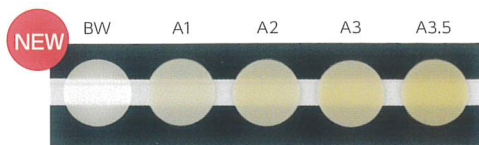

## 10mLカートリッジ



### 10mLカートリッジ

色調●4色=A1, A2, A3, A3.5

包装・希望医院価格●

1函：カートリッジ(10mL) 1本, EMミキシングチップT 10本=各¥5,880

歯科用高分子製断間クラウン及びブリッジ ジーシー テンプスマート  
管理医療機器 226AABZX00140000

## 48mLカートリッジ



### 48mLカートリッジ

色調●5色=BW, A1, A2, A3, A3.5

包装・希望医院価格●

1函：カートリッジ(48mL) 1本, ミキシングチップII (SSS) 16本=各¥12,880

### 別売



### 10mLカートリッジ用

## ジーシー EMディスペンサー

包装・希望医院価格●1個=¥7,000

10mLのカートリッジは、プランジャーを外してEMディスペンサーに装着しても使用できます。

歯科用充填・修復材補助器具 ジーシー EMディスペンサー  
一般医療機器 13B1X00155000187  
製造販売元 株式会社ジーシー

### 別売



### 48mLカートリッジ用

## ジーシー カートリッジディスペンサーII

包装・希望医院価格●1個=¥14,210

48mLカートリッジは、カートリッジディスペンサーIIで使用します。

歯科用練成器具 ジーシー カートリッジディスペンサーII  
一般医療機器 23B2X00038000019

### 【関連製品】



咬合採得／多用途透明シリコン印象材

## ジーシー エクザクリア

包装・希望医院価格●

2カートリッジ1函=カートリッジ51g(48mL)2本, ミキシングチップII L, S各3個=¥7,200

歯科咬合採得用材料(歯科印象採得用器材) ジーシー エクザクリア  
一般医療機器 13B1X00155000286  
製造販売元 株式会社ジーシー

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年9月現在のものです。  
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333  
営業所  
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722  
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも  
App Store  
Google Play  
ジーシー 公式アプリ  
どちらもコチラのQRでOK!  
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

