

# リプロメルト・リプロクリーン キャンペーン

**増量**

期間：2024年2月21日～3月20日

義歯洗浄剤 ※希釈せず原液で使用

## リプロメルト

5～10分の超音波洗浄で、義歯に付着した頑固な歯石も除去可能。洗浄・除菌効果に優れた、歯科医院専用の義歯洗浄剤です。

リプロメルト通常品  
内容量：1,800mL  
標準価格：¥4,300

リプロメルト増量  
内容量：100mL  
標準価格：¥360

リプロメルト  
標準価格 合計 **¥4,660** 489139

歯石  
除去に



義歯洗浄剤 ※2倍希釈

## リプロクリーン

5～10分の超音波洗浄で、タバコのヤニなどの頑固な汚れの漂白と除菌が同時にできる、歯科医院専用の義歯洗浄剤です。

リプロクリーン通常品  
内容量：1,200mL  
標準価格：¥4,700

リプロクリーン増量  
内容量：100mL  
標準価格：¥360


リプロクリーン  
標準価格 合計 **¥5,060** 384202

着色  
除去に




### 【使用方法】

①本剤を現液のまま補綴物全体が浸るまで容器に入れます。

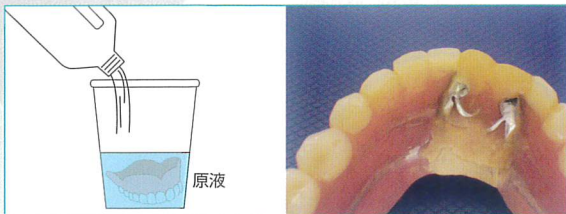

②容器ごと超音波洗浄器に5～10分程度かけます。

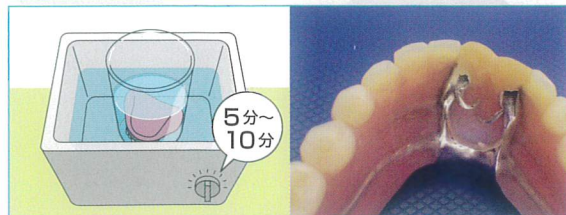


### 【使用方法】

①本剤を2倍に薄めて、充分攪拌の後、補綴物全体が浸るまで容器に入れます。



②容器ごと超音波洗浄器に5～10分程度かけます。

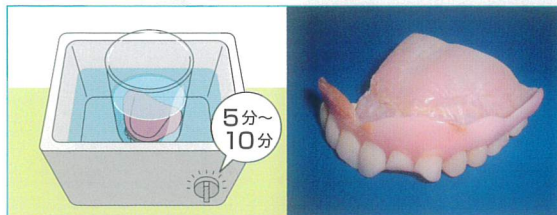

※本チラシに記載の価格は2024年1月現在の標準価格(税別)です。

### リプロメルト・リプロクリーン 増量キャンペーン 注文書

貴医院名
ご住所
TEL ( )

コードNo.	商品名	注文数
489139	リプロメルト 増量キャンペーン	
384202	リプロクリーン 増量キャンペーン	

■取扱店

株式会社マルヤマ歯科商店

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

発売元：株式会社 **ヨシダ**  
東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541 (コンタクトセンター)



(01)02747937021415

C02569/2024年2月/@1/新